

日本八光穿刺针

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 日本八光穿刺针 |
| 公司名称 | 济南洪富商贸有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南山东省济南市窑头路东段3号 |
| 联系电话 | 86-05318586882 13181719710 |

产品详情

产品介绍穿刺针，囊肿穿刺针，脐带穿刺针，羊水穿刺针，子宫肌瘤穿刺针，PTC-B穿刺针PTC穿刺针，介入穿刺针，乳腺定位针，千叶针，肝穿刺，臭羊穿刺针，腰椎穿刺针，肾穿刺针，膀胱穿刺针，动静脉穿刺针，椎间盘穿刺针，套管针，日本八光穿刺针，型号:16G.18G.20G.21G.22G.23G.25G/100 mm150 mm200 mm350 mm可根据医生要求定做不同的规格型号。【适用】各种脏器的穿刺，药物注射和放置导管。【特点】锋利、穿刺性能强且富有弹性不易折断。内外壁，均光滑，损伤小，针尖经特殊加工，超声下针尖显影清晰。产品属性操作方法 警告

预先应慎重确认穿刺的适应情况,穿刺路线及刺入部位。

门静脉穿刺时需注意[会发生胆道内出血，腹腔内出血]。禁忌/禁止 1.禁止重复使用。《配套医疗用具》

- *不可使用塑料引导丝[有可能引起被覆塑料的剥离，破损及引导丝的断裂]
- *不可使用经树脂等涂层的处理的弹簧型引导丝[有可能引起涂层的脱落]《使用方法》
- *引导丝已从PTC针的前端针尖处穿出时，不可将引导丝再拉回针内 [有可能会引起引导丝的损伤和断裂]

[形状，构造及原理等] 本品用做为造影剂注射针时，主要用于胆管及胆囊的造影。《构造详见 原文》

操作方法或使用方法等 本品为灭菌品，无须消毒，可直接使用。请在专家指导下，使用本品。

(例)胆管穿刺。 1.手术前准备：在超声引导下实施穿刺（包括消毒，麻醉）。 2.应脱去保护套管。

- 3.观察穿刺目标，预定穿刺路线。 4.把PTC针固定在超声探头上。如有必要应使用引导针。
- 5.观察PTC针针尖在超声下的影象，向目标胆管穿刺。
- 6.拔出内针。18G会有胆汁流出现象。22G一般需用注射器轻微抽吸出胆汁，确认已刺入目标。
- 7.接延长管，吸引胆汁及注入造影剂。 8.拔去外针，实施造影。 注意事项《其他相关使用方法》

- *应预先确认所用针的粗细及长度。
- *应确认与本品搭配使用的器具是否合适，并请详细阅读该器具使用说明书。
- *搭配使用引导丝时，应确认是否匹配。
- *去除保护套管时，请不要碰到针尖部位。（可能会造成针尖部位变形，降低 穿刺效果）
- *请在外针基座及内针基座的设置正确的情况下，实施手术。 *不要直接用手触碰外针及内针。
- *在穿刺时，应慎重选择穿刺路线。 *请不要强硬穿刺[有可能造成组织损伤、撕裂，损坏本品]

[使用前注意]《重要的基本事项》 *请确认医药所附说明书后使用。

- *手术结束后，应注意放置避免误刺。 *如包装有破损、污损情况，产品异常现象请不要使用本品。
- *请在使用前开封。 其他注意事项 *使用后为了防止感染，请安全处理本品。 *本品已消毒

[储藏、保管方法及使用期限等]《储藏、保管方法》 防水，避免阳光直射、高温多湿。

《有效期、使用期限》 请参照包装上使用期限。 [包装] 25支/1箱 交易说明山东玺宏贸易有限公司，是专

门从事医疗器械经营。电话：0531-88586882，13181719710，13210533167。