

大量现货供应生物电子止鼾器、腕式红外线电子止鼾器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 大量现货供应生物电子止鼾器、腕式红外线电子止鼾器 |
| 公司名称 | 深圳市科蒙尔电子科技有限公司 |
| 价格 | 33.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区广基大厦211（办公场所） |
| 联系电话 | 13632958821 13554834607 |

产品详情

本公司是研发、生产及销售于一体的生产厂家，具有经验丰富专业的生产/品质/研发等技术人员，软件硬件设备齐全。可根据客户要求研发各类新产品。承接oem订单。本公司产品价格有优势，产品信价比高！可做贴牌！欢迎咨询！

您的十分满意，我们的无限动力！！咨询电话：13422864025胡先生

qq：624438759

电子表直径5.5cm重量：约80克套装：2适用人群：鼾症人群商品颜色：白灰色交流电变压器适合年龄：中年人材质简介：电子针灸包装尺寸：21*16*5cm包装方式：盒装

商品简介：腕式电子止鼾器是一项采用生物回馈的自我训练模式。来降低或减少打鼾行为的一种物理康复仪器。它的过程是透过止鼾器上的微型生物声频侦测器，在侦测超过70+5db的鼾声10=1秒以上，控制ic即启动脉冲输出机制，以温和的可调的电子针灸方式，透过皮肤送达运动神经，再不吵醒使用者的前提下，促使使用者因反射作用产生变换睡姿，达到抑制和减少打鼾的功效。本品还有省电功能设计，当超过30秒以上侦测不到鼾声时，则自动关机。而累积使用8小时以上即自动关机。只要持之以恒地使用本品，就能达到满意的效果。

使用说明：开机操作：按住开关/确认键并保持数秒，绿色指示灯闪烁，进入开进状态，此时可以按增大键调大电脉冲幅度；按减小键调小电脉冲幅度；调好电脉冲幅度后，再按一次开关/确认键作为确认，此时没有电脉冲输出，绿色指示灯闪烁几秒后，绿色指示灯熄灭，进入监控状态，此时如检测鼾声，机器就会有电脉冲输出。关机操作：止鼾器在监控状态下按住开关/确认键，并保持数秒，橙色指示灯闪烁，进入关机程序，待几秒钟后橙色指示灯熄灭，进入关机状态。

注意事项：a、勿让不能表达意志的婴儿使用。b、严禁与其他医疗器械同时使用。c、心脏病和高血压者。d、孕妇禁用。e、对电刺激过敏者禁用。f、器官性病变（如鼻息肉、鼻肿瘤、鼻甲肥大、扁桃体肥大等患者）应按照医师嘱咐使用。g、与高频设备同时使用，可能在电极位置引起燃烧，也可能损坏止鼾器。h、在短波或微波治疗设备附近使用，止鼾器输出可能不稳定。i、调节止鼾器输出增大时，止鼾器电流密度会超过2毫安/平方厘米，请使用者特别留意