

ES-300高频电刀 整容外科专用电刀 北京索吉瑞

产品名称	ES-300高频电刀 整容外科专用电刀 北京索吉瑞
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

部分技术参数：

具备内窥镜切割模式，具备5档调节，电切持续时间逐位递增

开机调用最近使用的模式、功率等参数

具有记忆9组模式、功率等参数，且可快速调用功能

内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷

单极模式启动可使用手控开关启动，也可使用单极脚踏开关启动

双刀笔，双输出功能，同一手术，可连接两支电刀笔，两个医生可同时同步进行手术

具备连接氩气刀功能

设备常规管理

(1)详细阅读操作指南及注意事项

(2)定期检查设备性能

(3)防止漏电或短路

病人的安全:

(1)使用前后检查病人皮肤的完好状况，并记录异常情况;(2)在使用碘酒、酒精消毒病人手术区域时，必须待酒精完全干燥、挥发后方可铺巾和使用电外科设备;使用后的酒精纱球应及时撤离手术野

(3)正确揭除负极板,注意保护皮肤，防止各种皮肤的潜在损伤，从边缘沿皮纹方向缓慢揭除负极板;4)不在电极附近使用电刀