

# 犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告

产品名称	犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告 犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告是一款专业的犬伤伤口冲洗设备，配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌洗，达到减少细菌病毒数量的目的，符合规范化犬伤伤口处置规范，是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。规范要求 犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告

## 研发背景：

近年来，随着我国饲养量的快速增加，动物致伤尤其被犬、猫伤害的人数不断增加，再加上运动、野外作业等意外产生的外伤，污染伤口清创作为外伤处置步，也就显得尤为重要；处理不慎增加了感染狂犬病、破伤风的风险！

一. 我国是受动物致伤（狂犬病）危害最为严重的国家之一，仅次于印度，居第二位，狂犬病一直位于我国各类传染病报告死亡数的前三位。

二. 狂犬病不但严重威胁人民群众的生命安全，而且容易造成严重的心理影响和沉重的经济负担，不利于社会和谐发展，因而狂犬病的显得尤为重要。 针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，专业人员可根据情况选择的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。 医用外伤冲洗器（二类器械）|

水压：三档可调，8-12PSI，满足不同需求；|

水流：1.4L/Min-3L/Min,大水流量，清洁程度高；|

时间：4个周期共16'41"，各周期科学分配，保障清洗效果；|

水温：PID智能温控，进水温度 5 设备正常工作，出水温度在30-40 适宜区间，且有过热停机保护设置；|

配置专用清洗枪万向支架；|

智能小巧，安装便捷。 消毒液说明

的复合消毒制剂：季铵盐+醋酸氯己定（双效杀菌）

具有狂犬病毒杀灭双机构认证：

军科院军事医学研究院兽医研究所实验室狂犬病毒灭活报告

中关村医药检验认证机构（MA认证）狂犬病毒灭活实验报告

在说明书【杀灭微生物类别】中写入狂犬病毒：

国内将狂犬病毒写入杀灭范围的消毒产品。 犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告

能灭活狂犬病毒

降低狂犬病发病几率

杀灭伤口常见致病菌

防止感染，促进伤口愈合

对安全无毒、无刺激作用 作用机理 犬伤冲洗器-SP-CXQ100C-带有狂犬灭活报告

[医用外伤冲洗器-山西地区-欢迎来电](#)