

# 电波拉皮仪器 RF电波拉皮仪

产品名称	电波拉皮仪器 RF电波拉皮仪
公司名称	曼威美容仪器公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道办后亭村衙边学子围工业区A栋4层
联系电话	0755-33163099

## 产品详情

### 产品介绍：

电波拉皮 作用原理：电波拉皮设备采用了一个电容耦合电极来传送无线电波能量并产生一个电场穿过皮肤表层进入皮下组织。在6兆赫的高频率下，这个电场每秒钟变换极性6百万次。为了回复电极的快速变换，皮肤内的电荷粒子在同样的频率上会变换方向。这时皮下组织的自然电阻会运动产生热能，它是利用真皮层胶原质在摄氏六十至七十度的温度时，会产生立即收缩的特性，可以让松弛的肌肤在治疗后，即时就感受到向上拉提、紧实的拉皮效果。探头可发出每秒震动高达6百万次的无线电波，高频率的震动能使皮肤内的分子因摩擦而产生热能，温度大概在68度 - 72度之间，借着热能使得胶原蛋白收缩，并随着时间不断的再生、重组，进而达到使紧致肌肤、改善皱纹的效果。

### 电波拉皮 除皱原理：

操作部位描述 操作部位脸部分为：额头、眼部、鼻唇脸颊

1、额头：最佳能量设置为5-8范围。具体操作见脸部治疗规划图解，由额头中间向两侧方向逐道提拉，每道连续重复5-8次，直到出现红晕，如皱纹纹路较深，用探头沿皱纹的纹路微微用力，重复2-4次，局部加强疗效，眉毛上方边沿1cm以内为痛觉敏感区，应适当调低能量。

2、眼部：最佳能量设置为3-8范围。

具体操作见脸部治疗规划图解，由眼周围从内向外操作，除皱电极从（脸部治疗规划图解）距离眼1cm的位置开始逐渐向太阳穴方向推进，眼外角和眉毛尾尖位置，按脸部治疗规划图解所示的箭头方向提拉，操作时用左手轻轻提拉颞部跟眼外角部的皮肤，协助上提操作，如鱼尾纹或其它部位皱纹比较深的，用探头沿皱纹的纹路微微用力，重复2-4次，局部加强疗效，眼部n比较丰富，痛觉敏感，操作时要注意保护。

3、鼻唇脸颊：最佳能量设置为6-10范围。具体操作见脸部治疗规划图解，操作顺序由下向上的方向提拉，由于脸颊区没鼻、唇区敏感，可酌情加大能量，重复拉5-8次，直到红晕出现。鼻唇区敏感度比较强，要注意力度和能量的控制，（应注意的部位：危险三角区、颧骨区、乳突区前侧、下颌角下沿区）

电波拉皮 能达到的效果 紧致肌肤。 皮肤上提收紧。 肌肤细致。 脸形雕塑。  
祛除(真性)(假性)皱纹。 修复妊娠纹。 改善肌肤的新陈代谢(青春豆、斑等)。 全身抗衰老。

那么通过高频电波进入皮下组织使皮下组织的自然电阻运动产生热能，当温度达到摄氏六十八至七十二度零介点，胶原质产生立即性收缩的同时，刺激真皮层分泌更多的新的胶原质来填补收缩和流失的胶原质的空缺，从而再次托起皮肤的支架，恢复皮肤弹性。当源源不断产生胶原质时，就会使皮肤真皮层的厚度和密度增加，填平皱纹，消除疤痕，恢复皮肤弹性和光泽，使皮肤看起来白皙嫩滑。研究证明，在没有受伤的皮肤基层中，细胞分裂的活动是很慢的。一旦皮肤受到损伤，伤口周围2mm左右的表皮层的基细胞的分裂速度就比平时快40倍。细胞分裂由基层向上扩展。即使是小小的伤痕也足够刺激细胞的加速分裂。皮肤细胞产生的两种化学物质导致了此种反应：抑素和胶原酶。抑素产生于上表皮中并阻止基层细胞分裂。上层的细胞-死-后，阻止基层细胞分裂的元素消失了，细胞就开始分裂以便进行自我修复。只要皮肤还能产生新的胶原质，表皮胶原酶就在负责构建未成熟的胶原质的同时也调节皮肤胶原质的形成；伤-口产生胶原酶。 电波拉皮的系统

强大的电波主机能产生600kh的频率，能够直接瞄准要治疗的组织。电波主机由一个电脑控制盒控制，内建的电脑微处理器能够不断接收由治疗握把所回报的治疗讯息；包括温度、治疗压力以及电波对组织的治疗状况。为提高使用者的便利性，使用者容易操作的电波主机仪表板上；而且重要的使用者讯息会显示在嵌入式的电视萤幕上。这些讯息包括传送的能量、组织的电阻、无线电频激发时间、甚至手术技术的讯息。 电波拉皮治疗探头

治疗探头包含必要的装置，将rf转换成体积式热能传导到皮肤。

加热：热能传导器将rf能量转换传导到皮肤，透过皮肤电热调节器，接触薄膜会继续监控表皮温度。

每一个治疗探头在运送前就已先经消毒过，每一个治疗探头设计为抛弃式单一病患自用。此单一病患自用的探头的功能是透过系统电子强制执行的。这台仪器的设计以病患的安全为最优先考量。

韩版电波拉皮是以表皮恒定常温，射频电波深层加热为核心技术，在确保肌肤舒适不受损伤，然后利用射频电波产生热能传导作用，精确直达皮肤深层，加热真皮层胶原组织。当皮肤深层胶原组织的热能达到45 -60 时，自然产生立即性收缩，刺激分泌更多新的胶原质来填补萎缩和流失的胶原蛋白的空隙，并进行重新排列，重建皮肤软支架，最终实现紧致肌肤、填平皱纹、恢复皮肤弹性和光泽的效果。

用于人体的过程： 产生深层热； 增加血液中含氧量和营养物质； 促进淋巴液循环；  
促进血液循环；

增加体温和扩大皮肤毛孔； 在淋巴组织里增加二氧化碳和氧气含量

功能 1、收紧提升 2、美白祛皱 3、面部整体修复 4、改善眼部问题性肌肤  
5、溶脂纤体、减肥收紧 6、肾保、卵保等理疗