

# ES-200高频电刀 神经外科专用电刀

产品名称	ES-200高频电刀 神经外科专用电刀
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

索吉瑞新一代高性能高频手术设备

采用索吉瑞新一代的脉冲切凝模式，无论切割还是凝血，皆可通过脉冲输出掌控手术进程，jingque控制热损伤和切割深度。

电刀安全管理要点

环境要求

(1)避免在有挥发性、易燃、易爆气体(如:麻醉气体yimi)的环境中使用，防止电弧引爆气体(2)禁止开放给氧，避免在高浓度环境中使用电刀在气道部位使用电刀时应暂时移开氧气。

操作者注意事项

(1)不接触目标组织时，避免使用电刀，否则可能引起电弧灼伤。(2)不可盲目加大输出功率，应先检查负极板与病人的接触及连接情况，功率应由小到大逐渐调试。(3)产生的烟雾和颗粒对人体有害，应及时吸净(4)及时清除电刀头上的焦痂组织，保持电刀清洁干燥避免直接用水泡洗。