

高分子夹板用于四肢骨折外固定替代传统石膏

产品名称	高分子夹板用于四肢骨折外固定替代传统石膏
公司名称	陕西安信医学技术开发有限公司
价格	.00/件
规格参数	315:7.5*30CM 415:10*40cm 425:10*75cm
公司地址	陕西省西安市蓝田县西北家具工业园聚贤路29号
联系电话	18049408024 18049408024

产品详情

高分子夹板，高分子绷带，所在地：陕西省西安市蓝田县西北工业园

一类耗材，用于四肢骨折外固定，替代传统石膏

高分子夹板绷带和石膏对比优势

- 1.原材料韩国进口玻璃纤维，国内生产。产品质量有保证，
- 2.操作简单，固化时间短。常温水中浸泡2-3秒，拧干敷于患处，纱布缠绕固定即可，3-5分钟硬化，15分钟可承重。石膏需要先在水里完全浸泡，一层一层缠绕，完全固化需要2个小时，医生操作完，需要清洗手中石膏粉。高分子则不需要，减小医生工作强度
- 3.拆卸和换药方便。高分子夹板固定用纱布缠绕固定在患肢，骨折有伤口需要敷药，只需解开纱布，重新缠绕固定即可。后期拆除夹板，也只需解开纱布，无需像石膏拆除需要石膏锯锯开。
- 4.舒适安全性。安信高分子绷带变干后收缩性小，不会产生石膏绷带变干后皮肤发紧、发痒的不适感觉;也不会出现石膏在硬化过程中，吸水再结晶时，有热反应，使病人皮肤产生烧灼的不适感。高分子夹板贴敷皮肤有棉层，佩戴舒适。
- 5.良好的透气性。安信高分子夹板使用了高质量原纱，具有良好的透气性，解决了长期局部管式包扎因透气性差所导致的皮肤潮热，瘙痒等不适感。
- 6.透X光。安信高分子绷带及夹板对放射线的通透性，X线效果清楚，可确保医生对患处的接骨，以及愈合情况的准确把握。防止石膏显影不清晰，复查二次固定
- 7.质量轻硬度高固化快。经检测固化后的安信高分子绷带硬度是传统石膏的20倍，无石膏脆性，这一特点对保持正确复位后，起着可靠的固定作用。质量轻，相当于石膏的1/5，对患处负重小，有利于局部血

液循环，促使愈合，冬天可穿外套。

8.硬化后防水性强。安信高分子夹板采用的布料，均为国家一级标准的拒水布，可以阻挡85%的外来水分渗入，在患部接触到水的环境后，也能有效的保证患部干燥，可戴着洗澡

9.塑型性好、操作灵活。弯曲和拉伸强度高，可随意弯曲，根据不同部位随意塑性，贴敷性好，未硬化之前也可以随意裁剪理想形状

10.颜色多样、规格齐全。高分子绷带颜色多（白.绿.红.黄），可以满足患者个性需求。多种规格，可根据患者不同体型，选用合适规格，无需定做。