

ES-300高频电刀 内镜切割功能

产品名称	ES-300高频电刀 内镜切割功能
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

接触质量监督系统(REM)

可检测接触电阻变化。当中性极板和人体接触面积的电阻大于或等于150Q，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止，确保安全。

记忆储存功能

具有记忆9组模式、功率等参数，且可快速调用功能。开机调用最近使用的模式、功率等参数。

双刀笔，双输出功能

同一手术，可连接两支电刀笔，两个医生可同时同步进行手术。

开机自动检测功能

内设开机自动检测系统和自动报警提示功能:自动检测错误代码和自动报警错误提示。

相关注意事项温馨提示：

4.要确定患者手术附件的位置，避免手指接触导电粘合表面，小心地将其拉平并按压四个角。

5.确保回路板是完全粘合的。

6.使用附件回路板：将汇路连接到附件接头，并确保附件接头插入回路插座。

使用未连接的回路板检查返回线路是否良好，打开夹头以放置回路贴片，然后夹住并轻轻拉动，以确定其不会被释放，然后将连接器插入回路插座中。