

ES-300高频电刀 10种工作模式 北京索吉瑞

产品名称	ES-300高频电刀 10种工作模式 北京索吉瑞
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

一：技术参数

1：适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

2：输出功率 300W

3：输出频率 400KHz

4：输入功率小于等于1000VA，环保节能

5：CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

*6：具有10种以上工作模式，其中单极电切模式 4种，单极电凝模式 3种，双极电凝模式 3种

7：纯切性能：1~300W（负载 500 ），要求功率连续可调

8：混切性能：1~250W（负载 500 ），要求功率连续可调

*9：单极凝性能：1~120W（负载 500 ），要求功率连续可调，最大输出电压 4800V

*10：双极性能：1~150W（负载 100 ），要求功率连续可调

*11：喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调

*12：喷凝和强凝工作模式峰值系数 6.0

13：四种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用；混切3用于切割时带有zuihao止血效果时使用

.....

负极板使用方法：

.....

7.使用双环安全监测系统时，必须同时启动。如果使用其他品牌，则必须遵循其他安全监控系统的操作。

8.将负极板从操作位置垂直安装回路板至当前方向。

9.电极板尺寸选择标准：成人、儿童或婴儿应尽量使用最大尺寸的回路板。如果回路板的粘贴位置是上臂或大腿，则应避免它不接触回路板。