

半自动活检针

产品名称	半自动活检针
公司名称	济南洪富商贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济南山东省济南市窑头路东段3号
联系电话	86-05318586882 13181719710

产品详情

产品介绍规格型号:14g16g18g20g*100mm/150mm/200mm操作方法通用说明：1.

普利塞，是用于软组织的活检针，在针尖处做有槽口的抽针技术是已改进了的传统“活力银针法”。2. 普利塞，不象手动系统，可通过一个弹射装置自动进针当针管缩回到顶端时加载力度，当针管伸到最顶端时释放；其它功能包括可以选择（1cm和2cm）进针和拆下外管针。3.

此产品是由受过培训和在诊断和介入技术有经验的医生来使用。警示和注意：1.本器械设计的就是为医生使用的，如使用者不熟悉本器械，就有必要在一个更在行的专家医生指导下操作。2.

本说明不是在解释或建议任何医疗或外科技技术，操作者个人要对使用本器械的步骤和技术负责。3.

确认内包装未被打开和没有损坏。如内包装被损坏，不要使用。4.请检查有效日期和针径规格。5.

请检查套管针和内芯针是否已双配好，如没有，请查针座。6.使用时病人可能不适应属正常。7.

在ct引导下取活检标本时，要植入一个引针，再通过引针操作一根同轴活检针。8.

在针芯未到达预定区域前不要推动按钮，确认针芯适当落位。9.本产品只能用于软组织上。10.

在使用前，确认套管针没有变弯。11.不要在mri下使用本产品。12.在用引针同轴取活检样时，请尽量不要使活检针弯曲过多，因为与引针内壁的摩擦会使活检针不能完全进入。13.一经用过，视为废品。14.

储存在凉干环境，避光。15.只限医生使用。16.环氧乙烷消毒。17.

只有在观察符合上述条件时，才能保障产品的消毒和完整。只能在医院使用。使用指导：1.

先确定在何处取活检样，最好在b超或ct引导下找好位置。2.

为了顺利进针，建议先用手术刀在皮肤上做个切口。3.将针芯处在开始位置，同时套管针退回到最高位置。确认套管针尖与针芯顶端已错开一些毫米。（1）（2）4.推针进入目标。5.

使套管针在目标里调到工作位置，一旦按动发射扭，弹射将使外套针自动前进。（3）6.抽针。拆下外套管针，取出标本【适用】肝，肾，前列腺以及腹腔内肿块的组织活检。【特点】半自动切割式活检针

，操作简便、弹力强、组织获取可靠附有定位针，便于ct下操作。产品属性意大利hs系列活检针：适用于肾脏、肝脏、肺、乳腺、甲状腺、前列腺、胰腺、子宫、卵巢、体表等多种器官，可用于锥体肿瘤和不明种肿瘤等的活组织取样、吸取细胞。利用外针可拆卸，可注射止血剂和治疗等。1、肾活检：肾穿刺又简称肾穿，肾穿刺活检全称为肾穿刺活体组织检查法，是肾脏病病理诊断的一方法。指应用穿刺针刺入活体的组织，取出少量肾组织，进行病理学分析。目前主要有2种方法，一是开放穿插刺肾活组织检查法，一是经皮肤穿刺能活检法，后一种方法为国内外普遍采用的方法。2、肝活检：确诊脂肪肝的主要方法肝穿刺主要用于：局灶性脂肪肝与肿瘤区别。探明某些少见疾病，如血色病、胆固醇酯贮积症、糖原贮积症等。无症状性可疑非酒精性脂肪性肝炎，肝穿刺活检是唯一诊断手段。戒酒后酒精性肝病或酒精性肝病有不能解释的临床或生化异常表现者。肥胖者减少原有体重10%后，肝酶学异常仍持

续者，需肝穿刺活检寻找其他原因。任何怀疑不是单纯肝细胞脂肪变或怀疑多病因引起者。

3、乳腺活检癌：乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤。乳腺x线照相可发现一些乳腺微小病变，为明确这些病变的性质，往往需行乳腺手术活检。[1]报道约~2—4%的病人因乳腺像检查提示有可疑癌变而行外科手术活检，而这些病变中有70~90%为良性。因此寻找一种简单可靠、操作性小的诊断方法已成为必要。x线立体定位下乳腺粗针穿刺活检（stereotactic needle core biopsy, scnb）为近年来发展起来的诊断方法之一，越来越受到广泛重视。

其他说明2、肝活检：肝穿刺主要用于：局灶性脂肪肝与肿瘤区别。探明某些少见疾病，如血色病、胆固醇酯贮积症、糖原贮积症等。无症状性可疑非酒精性脂肪性肝炎，肝穿刺活检是唯一诊断手段。戒酒后酒精性肝病或酒精性肝病有不能解释的临床或生化异常表现者。肥胖者减少原有体重10%后，肝酶学异常仍持续者，需肝穿刺活检寻找其他原因。

任何怀疑不是单纯肝细胞脂肪变或怀疑多病因引起者。

3、乳腺活检癌：乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤。乳腺x线照相可发现一些乳腺微小病变，为明确这些病变的性质，往往需行乳腺手术活检。[1]报道约~2—4%的病人因乳腺像检查提示有可疑癌变而行外科手术活检，而这些病变中有70~90%为良性。因此寻找一种简单可靠、操作性小的诊断方法已成为必要。x线立体定位下乳腺粗针穿刺活检为近年来发展起来的诊断方法之一，越来越受到广泛重视。

4、前列腺活检：经直肠超声引导前列腺穿刺活检利用超声引导活检针到达前列腺的特定位置以及取病理诊断需要的组织。适应症（1）前列腺特异抗原（psa）超过4ng/dl
（2）肛门指诊前列腺有结节
（3）前列腺超声检查有异常（4）转移性腺癌，原发灶怀疑是前列腺者交易说明适应症

12g、14g乳腺活检 16g肾活检、肝活检 18g前列腺肝活检、肺活检 20g肺活检甲状腺细胞活检