

# ES-120利普刀 四种凝血模式 妇科专用

产品名称	ES-120利普刀 四种凝血模式 妇科专用
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-120高频手术设备：

注册证编号:国械注准20223010778（见首页荣誉资质）

北京索吉瑞ES-120高性能高频电刀技术参数

技术参数

1：适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

\*2：输出功率 120W

3：输出频率 400KHz

4：输入功率小于等于1000VA，环保节能

5：CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

手术之前和手术之中严格检查。严密注意极板和刀头、接插件及连接电缆的完好性、连续性就是极端重要的了，一旦手术中发现病员受到较大的肌肉、神经刺激(颤抖)那么必须立即停止手术，检查电缆是否有折断点、接插件是否锈蚀、松动。迂应定期检查两输出端之间的直流阻抗，应 $\gg 2M$  欧姆。当然病员受到低频刺激也可能来自于其它原因，如电刀本身低频漏电流过大，输出回路阻抗过低，电刀整个系统悬浮不良或引入市电等，也必须停机查明原因或调挟整个电刀系统。类似于断线打火，电刀的启动和刀头点向组织不能像雨点一样过于频繁，这种火花也可能含有一定低频成分，但由于电刀启

动线路有延时机构、医生动作也不可能无限制地快，故一般不会发生问题，然而提醒注意仍然是必要的。切勿将褥疮误认为电刀灼伤