

ES-120利普刀 宫颈电热圈环形切除术

产品名称	ES-120利普刀 宫颈电热圈环形切除术
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-120高频手术设备：

注册证编号:国械注准20223010778（见首页荣誉资质）

部分技术参数：

四种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用；混切3用于切割时带有zuihao止血效果时使用

两种单极电凝模式：柔凝能够达到最大的电凝深度，防止组织碳化，大大降低电极对组织的粘连；强凝非接触凝血，但输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血

两种双极模式：标准模式适用于大多数双极应用。保持低电压，以防止出现电火花；精细模式用于高精度和精细控制干燥量时使用。保持低电压，以防止出现电火花

电刀注意事项：

日常检查

本机的附件为易耗品。因此，在每次使用前应仔细检查其完好性。特别是其绝缘层不得破裂，导线不得断折，接插件不得松动，手控开关应动作准确灵活。在消毒、使用和储存时，电缆不应过分弯折，并不

要过长时间置于消毒容器(柜]内。

机外附件经长期反复使用后，易产生绝缘老化、变质甚至破裂、导线断折、接头松动和氧化、开关失灵等现象。应对其经常检查。必要时，给于更换。平时应备有适量的备件。