

ES-200高频电刀 整形美容专用高频电刀 北京索吉瑞

产品名称	ES-200高频电刀 整形美容专用高频电刀 北京索吉瑞
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

采用索吉瑞新一代组织反馈技术，系统通过每秒"400次"的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率。通过调频方式调整输出功率保持量大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小
喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V。

高频电凝术以后，病人自己要注意的就是自我感觉一下，有什么不舒服的症状，及时跟医生、护士要反映，及时进行处理这是很重要的一点，从医生、护士医院方面来讲，应该是对病人多巡视，多观察病人的生命体征，有没有一些并发症的情况。

高频电刀的使用及注意事项使用前正确连接各种连接线，测试机器运转是否正常，发现问题及时维修。

选用合适的负极板，放置在肌肉丰富、平坦且靠近手术区易于观察的部位。

身体裸露的部位应用布单包好，避免与金属接触。

将电刀笔的插头与机器连接，检查刀笔是否正常，调节好电刀和电凝，避免过大或过小。

若使用过程中出现故障应检查负极板是否接触不好或电刀笔手捏开关短路失灵。

使用完毕，断开开关，拔电源，取下负极板，收拾完好。