

日本八光穿刺针用于脏器的穿刺药物注射

产品名称	日本八光穿刺针用于脏器的穿刺药物注射
公司名称	济南洪富商贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济南山东省济南市窑头路东段3号
联系电话	86-05318586882 13181719710

产品详情

产品介绍穿刺针，囊肿穿刺针，脐带穿刺针，羊水穿刺针，子宫肌瘤穿刺针，ptc-b穿刺针ptc穿刺针，介入穿刺针，乳腺定位针，千叶针，肝穿刺针，臭羊穿刺针，腰椎穿刺针，肾穿刺针，膀胱穿刺针，动静脉穿刺针，椎间盘穿刺针，套管针，日本八光穿刺针，型号:16g.18g.20g.21g.22g.23g.25g/100 mm150 mm200 mm350 mm可根据医生要求定做不同的规格型号。【适用】各种脏器的穿刺，药物注射和放置导管。【特点】锋利、穿刺性能强且富有弹性不易折断。内外壁，均光滑，损伤小，针尖经特殊加工，超生下针尖显影清晰。操作方法警告预先应慎重确认穿刺的适应情况,穿刺路线及刺入部位。门静脉穿刺时需注意[会发生胆道内出血，腹腔内出血]。产品属性禁忌/禁止1.禁止重复使用。《配套医疗用具》*不可使用塑料引导丝[有可能引起被覆塑料的剥离，破损及引导丝的断裂]*不可使用经树脂等涂层的处理的弹簧型引导丝[有可能引起涂层的脱落]《使用方法》*引导丝已从ptc针的前端针尖处穿出时，不可将引导丝再拉回针内[有可能会引起引导丝的损伤和断裂][形状，构造及原理等]本品用做为造影剂注射针时，主要用于胆管及胆囊的造影。《构造详见 原文》操作方法或使用方法是本品为灭菌品，无须消毒，可直接使用。请在专家指导下，使用本品。（例）胆管穿刺。1.手术前准备：在超声引导下实施穿刺（包括消毒，麻醉）。2.应脱去保护套管。3.观察穿刺目标，预定穿刺路线。4.把ptc针固定在超声探头上。如有必要应使用引导针。5.观察ptc针针尖在超声下的影象，向目标胆管穿刺。6.拔出内针。18g会有胆汁流出现象。22g一般需用注射器轻微抽吸出胆汁，确认已刺入目标。7.接延长管，吸引胆汁及注入造影剂。8.拔去外针，实施造影。《其他相关使用方法》*应预先确认所用针的粗细及长度。*应确认与本品搭配使用的器具是否合适，并请详细阅读该器具使用说明书。*搭配使用引导丝时，应确认是否匹配。*去除保护套管时，请不要碰到针尖部位。（可能会造成针尖部位变形，降低穿刺效果）*请在外针基座及内针基座的设置正确的情况下，实施手术。*不要直接用手触碰外针及内针。*在穿刺时，应慎重选择穿刺路线.其他说明*请不要强硬穿刺[有可能造成组织损伤、撕裂，损坏本品][使用前注意]《重要的基本事项》*请确认医药所附说明书后使用。*手术结束后，应注意放置避免误刺。*如包装有破损、污损情况，产品异常现象请不要使用本品。*请在使用前开封。 其他注意事项 *使用后为了防止感染，请安全处理本品。*本品已消毒[储藏、保管方法及使用期限等]《储藏、保管方法》防水，避免阳光直射、高温多湿。《有效期、使用期限》请参照包装上使用期限。[包装]25支/1箱交易说明山东玺宏贸易有限公司，是专门从事医疗器械经营，介入医疗耗材专营公司,本公司和世界各大名牌医疗厂家为合作伙伴。电话：0531-88586882，13181719710，13210533167。