

ES-300高频电刀 可满足多科室的手术需求

产品名称	ES-300高频电刀 可满足多科室的手术需求
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

具有双极切割和凝血功能，双极最大输出功率150W，带组织阻抗控制技术，当组织闭合完成时可以自动停止输出并声音提示，避免发生组织碳化的情况。

喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V

高频电刀的使用操作流程

将仪器设备放置在合适位置，连接电源，打开电源开关，检查仪器是否处于备用状态。

将电极板连线连接到高频电刀仪上

连接一次性电极片(不得重复使用)

根据手术需要调节电切、电凝的参数

使用完毕，将数字键值调到最低值，先关主机电源开关再拔电源插头