

ES-300高频电刀 选型多样单极 双极多 功能均有

产品名称	ES-300高频电刀 选型多样单极 双极多 功能均有
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

.....

8：混切性能：1~250W（负载 500 ），要求功率连续可调

*9：单极凝性能：1~120W（负载 500 ），要求功率连续可调，最大输出电压 4800V

*10：双极性能：1~150W（负载 100 ），要求功率连续可调

*11：喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调

*12：喷凝和强凝工作模式峰值系数 6.0

13：四种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用；混切3用于切割时带有zuihao止血效果时使用

高频电刀操作规程

1、使用前，应详细了解电刀的型号、功能、功率及使用方法。

2、正确连接各种连接线，测试机器运转是否正常，在使用中或暂停使用期间有异常声音发出时,应立即

停止使用，并通知专业人员检查原因。

3、各输出口的输出功能单独激活，反复使用一次性的手控刀笔接触不良时勿再使用，刀笔使用完毕可用湿布将污血擦净晾干，避免直接用水泡洗，刀笔的消毒可采用低温灭菌法,如环氧乙烷灭菌等

4、合理选用和放置负极板，远离心电监护的电板.要自始至终紧密粘贴于任何肌肉丰富的部位,导电材料含水丰富，可增加皮肤的导电性.避免烫伤。

5、负极板应平整，面积不少于 64.5cm(10平方英寸)，禁止切割和折叠，zuihao避免重复使用，以防造成可能的交叉感染和灼伤。