

ICU用防压疮床垫 福州防压疮床垫 蒙泰护理减压防褥

产品名称	ICU用防压疮床垫 福州防压疮床垫 蒙泰护理减压防褥
公司名称	东莞市蒙泰护理用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路10号楼五楼北面
联系电话	18819503738 18819503738

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市蒙泰护理用品有限公司

蒙泰防压疮床垫的受益者都有谁？

你了解过为什么蒙泰要生产防压疮床垫，而不是市面上的气垫床吗？这是有原因的。

近期，有位40岁的阿华女士，上周在蒙泰店铺购买了张防压疮床垫，给她中feng的母亲使用，于是晚上陪床的阿华，终于听不到床边的噪音了，可以安稳睡上一觉。

阿华母亲因中feng后不能活动，易有发生褥疮的风险，之前使用的是气垫床，而气垫床的气泵需要24小时充气，ICU用防压疮床垫，气泵的声音在白天吵闹声中，没有感觉，但是一到夜深人静时，气泵的声音似乎是被扩大了10倍，让有压力的阿华在噪音下，无法安稳入睡，这样长时间，阿华的情绪与体力都将近崩溃边缘。

在这种情况下的阿华，无奈只能到社区医院寻求帮助，社区医院的护理人员告知她，福州防压疮床垫，现在有不需气泵充气或充电的防压疮床垫，是气垫床的升级替换产品，防褥疮的效果相对更好。

当阿华在网上找到蒙泰品牌的防压疮床垫后，没有犹豫下单购买了一张，次日到货后，就用上了，后期客服跟进回访时，阿华对我们的产品很是认同，使用起来方便，防压疮床垫，也不需要气泵充气，也不需要充电。晚上没有噪音影响了，睡眠也好了很多，休息好了，情绪也稳定，照顾母亲也更有耐心和细致了。

蒙泰防压疮床垫的受益者都有谁？也许照护者会有所体会。

防压疮床垫使用的注意事项

1、使用前，zui好给床垫铺床单

蒙泰生产的防压疮床垫由减压垫、防水床罩、床笠组成。使用时zui好再配置一张床单，因为床单可以保持床罩和床垫的卫生，床单更易清洗，同时避免减压床垫接触液体。一般医院使用时，都会配置病房zhuang用的床单。

2、防水床罩脏了，要及时清洗

蒙泰防压疮床垫配套的床罩可用消毒液浸泡毛巾擦拭消毒，亦可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行清理。

3、避免接触尖锐物品和腐蚀性液体

防水床罩能对床垫起到很好的保护作用，四面弹力防水透气，面料仿人体皮肤设计，具有防水防污透气kang菌阻燃技术，平滑且有张力，能顺应减压垫分散压力与摩擦力，便于使用者移动使用。如果床罩被尖锐物品划破了或者被腐蚀性液体侵蚀，就不能对床垫起到很好的保护作用，可能缩短床垫的使用寿命。若发现外套和床笠有破损，须及时更换。

4、下方一般不需要再放置其他床垫

蒙泰护理目前推出了多款防压疮床垫，例如：C-021-01、C-021-02、C-021-03、C-021-07、C-021-09等，这些床垫的尺寸都可以根据需求订做。一般情况下，选购的防压疮床垫厚度 10CM就不需要再外加普通床垫了。如果是选购了C-021-07型号的床垫且厚度为7CM，则可以考虑外加一张普通床垫放置在下方。

5、拒绝长时间捆卷存放

蒙泰防压疮床垫采用进口聚氨酯海绵与记忆棉材料组合而成，设计结构符合脊柱自然弯曲的人体工程学，能够有效分散压力，保证血液正常流通。在不使用的时候，不要长时间将其捆卷起来存放，因为可能会导致海绵严重变形，从而影响减压效果。

6、避免直接暴晒

使用蒙泰防压疮床垫时，避免直暴晒或放置于50 ° C以上的高温环境中。因为直接暴晒或置于高温环境中，可能会导致聚氨酯海绵与记忆棉材料高温变形，改变原有的人体工学设计，从而影响预防褥疮的效果。

以上6点，防压疮床垫厂家，就是蒙泰防压疮床垫使用时的注意事项。

为精神专科订制的265张防压疮床垫交付成功

6月25日，为精神zhuan科医院定制的265张防压疮床垫在装车时，天空突然下起了毛毛细雨，因是广东的雷雨季，又是疫情，又是下雨的这让我们的心悬了起来，就在忧心不能顺利送达防压疮床垫时，车间的8位同事已经在有条不紊开始装车，zui终，这满载着200多张防压疮床垫的17米卡车，驶进了惠州精神zhuan科医院，当防压疮床垫搬运送至ke室后，护理人员便迫不及待的把之前的床垫撤下来，换上了崭新的防压疮床垫，病房里顿时忙碌了起来。

这批专门为精神zhuan科医院订制生产的防压疮床垫，是蒙泰公司业务部和技术部的同事与临床护士长们一起多次反复商讨，确定需求而订制的。

防压疮床垫垫内垫由棕榈加高弹性聚氨酯海绵组成，外套为适宜厚度的防水耐氯的高分子纤维材料，外套不能使用拉链，需针线缝制封口。因精神zhuan科医院的病床无升摇，所以床垫为一整块，无需折叠。