

# 榆林神木大小轮轮椅出色的减震性能使用更舒适

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 榆林神木大小轮轮椅出色的减震性能使用更舒适                   |
| 公司名称 | 西安众泰医疗器械有限公司                            |
| 价格   | 698.00/个                                |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 陕西省西安市(未央区) 未央路与凤城二路十字<br>天地时代广场B座22112 |
| 联系电话 | 029-86102370                            |

## 产品详情

残疾人/老人助行代步铝合金系列 康尚轮椅 型号：amw04 产地：江苏

零售价：698.00，更多优惠价及活动，医院,养老院，康复机构请来电咨询 产品简介：

商品名称：康尚轮椅amw04型 生产厂家：江苏康欣医疗设备有限公司 商品产地：江苏 商品净重：9.8kg

产品描述 最新款轮椅 铝合金材质,轻便,美观,大方 携带方便,重量9.8kg 铝合金阳极、固定扶手、固定脚架  
座宽48cm、20寸后轮 可选配手刹 此款轮椅采用欧标生产

产品规格 高×宽：88cm×85cm 坐垫-地面：48cm 扶手-地面：68cm 靠背高：42cm

座宽：48cm 坐垫尺寸：41×37cm 前轮6寸 后轮20寸

中轮设计，更轻便，更小巧，是自推型轮椅中重量最轻的全铝合金设计，做工精良，质量上乘

使用说明 1、轮椅的打开：固定左右驱动轮；抓住手握将车架向左右稍许拉开；

使一个后轮略微浮起，并保持这种状态；用手掌压住未浮起侧的坐垫，使其打开。 2、轮椅的收合

固定左右驱动轮;折下两侧的手握；向上收合脚踏板；双手上拉坐垫，使左右慢慢合拢；

按住扶手两外侧向内折合即可。（注意：折合轮椅时，请不要手握扶手，有夹手的危险）

3、上下车方法：固定左右驱动轮；(注意：轮椅车滑动起来会非常危险，请务必刹住车轮。)

向上收合脚踏板；(注意：请不要踩着脚踏板上下车和不要把脚放在掀起的脚踏板上。)

稳稳地扶住轮椅车，慢慢起身移坐；放下脚踏板。 4、脚踏板的调节：

脚踏板角度的调节是通过调整升降管的高低位置来实现；抬起升降管使用者处于适当舒适的位置状态（左右要一致），调节时，请不要手握调节杆，有夹手的危险。

我们的联系电话，官网网站浏览地址及乘车/驾车/地铁方案：联系人：徐经理 029-86102370

15389079989 15389059499 传真：029-86102370

公司地址1：陕西省西安市(未央区) 未央路与凤城二路十字天地时代广场b座22112：ztyiliao@163.com

西安众泰医疗器械有限公司：http://www.xamedical.com/

西安众泰护理床销售公司：http://www.ztyiliao.com 西安众泰制氧机销售公司：http://www.xao2.com

西安众泰治疗仪销售公司：http://www.xazly.com/ 西安众泰轮椅销售公司http://www.xayuehe.com/

西安众泰医疗官方微博http://weibo.com/u/2674805751

西安高新众泰医疗器械有限公司http://www.ztgaoxin.com/ 营业时间：8:30-17:30（节假日不休，晚20:00以后产品咨询与业务洽谈请致电：15380959499）。（产品批发，团购与业务洽谈请致电：

15389059499，优惠活动请致电：029-86102370）邮编：710054 公司地址2：陕西省西安市（高新区）西安市内乘公交：市图书馆站或经济技术开发区站（k609，600，901,902,202,619,228,230,207,117,711,717,719,723，k618，214,903，游4。，游10）市图书馆站下车即到（雅荷花园向北50米十字东北角）。  
地铁二号线“市图书馆”站下车即到。 公司客服qq：1660026604 1620384804