

榆林神木鱼跃自动开关水银血压计

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 榆林神木鱼跃自动开关水银血压计 |
| 公司名称 | 西安众泰医疗器械有限公司 |
| 价格 | 98.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市(未央区)未央路与凤城二路十字 天地时代广场B座22112 |
| 联系电话 | 029-86102370 |

产品详情

【商品名称】鱼跃台式自动开关血压计 【商品规格】台式水银

使用范围：医院，诊所，家庭血压测量诊断 零售价：98.00 鱼跃水银血压计自动开关（乳胶球袋）

产品相关信息【主要材料】铝板、汞、乳胶【工作原理】由臂带充气压迫测量部位阻断血流，然后通过排放臂带中气体，使血液再次流动。血压测量就是根据血液再次流动时发出的血流声音或血管臂的振动变化而判断的。【用途】该产品是用于精确测定人体血压的诊断器具【技术参数】

1.测量范围:0~300mmhg(0~40kpa) 2.基本误差： ± 3.75 mmhg 3.灵敏度： 2.25 mmhg

4.尺寸： $350 \times 92 \times 50$ mm 【注册证书编号】苏药器监(准)字(91)2200690号

【生产许可证编号】苏食药监械生产许2001-0089号 【产品标准】gb3053-93

【生产企业】江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 使用方法 (1)室内要保持安静，室温最好保持在20 左右。

(2)在测量前，受检者要精神放松，最好休息20~30分钟，排空膀胱，不饮酒、咖啡和浓茶，并要停止吸烟。(3)病人可采取坐式或卧式，两脚平放，其肘部及前臂舒适地放在与心脏大约平行的位置上。

(4)打开血压计盒，放在病人肢体近旁的平稳处，并使水银柱垂直到零点。

(5)让病人脱下衣袖露出右上臂，如衣袖单薄宽大，可向上卷到腋窝处。(6)在缠血压计气袖时，先将气袖内空气挤出，再缠在右上臂肘关节上2~3公分处，不能太松或太紧。在肘窝内侧摸到肱动脉跳动后，将听诊器听头放在肱动脉上，打气测压。(7)关紧气球上的气门，测量者的视线应与水银柱上的刻度在一个水平上，来观察水银柱的高度。快速充气，待触知桡动脉脉搏消失后，再加压4kpa(30mmhg)即可停止充气，微开气阀门，使水银缓缓下降，当听到第一声脉搏跳动的声音时为“高压”，即收缩压。继续微微放气，水银缓缓下降到水银柱上的某一刻度，声音突然变弱或消失时为“低压”，即舒张压。(8)第一次测量完成后应完全放气，至少等一分钟后，再重复测量一次，取两次的平均值为所得到的血压值。此外，如果要确定是否患高血压，最好还要在不同的时间里进行测量，一般认为，至少有3次不同日的偶测血压值，才可以定为高血压。(9)整理好袖带、听诊器，把水银柱恢复至零点关闭，以备再用。

注意事项 1.打气时看袖带是否从旁鼓出，若鼓出应重新缠紧，以免产生误差。

2.对脑血管意外偏瘫病人，应在健侧上肢测量。因患肢血管可能不正常，以致血压测量不准确。

3.初诊病人应根据病情分别测左右两上肢血压，以作对照。青年高血压病人可测量上下肢血压以便比较。

4.天冷时，不能怕麻烦，不愿意脱衣，卷起多层衣袖，造成袖带下缘低于肘横纹，造成测量的血压偏低。

我们的联系电话，官网网站浏览地址及乘车/驾车/地铁方案：联系人：徐经理 029-86102370

15389079989 15389059499 传真：029-86102370

公司地址1：陕西省西安市(未央区) 未央路与凤城二路十字天地时代广场b座22112

公司地址2：陕西省西安市西斜七路十字东南角新一代国际公寓c座1002 西安市内乘公交：市图书馆站或经济技术开发区站（k609，600，901,902,202,619,228,230,207,117,711,717,719,723，k618，214,903，游4。 ，游10）市图书馆站下车即到（雅荷花园向北50米十字东北角）。 地铁二号线“市图书馆”站下车即到。

公司客服qq：1660026604 1620384804 公司邮箱：ztyiliao@163.com

西安众泰医疗器械有限公司<http://www.xamedical.com/> 西安众泰护理床销售公司<http://www.ztyiliao.com>

西安众泰制氧机销售公司<http://www.xao2.com> 西安众泰治疗仪销售公司<http://www.xazly.com/>

西安众泰轮椅销售公司<http://www.xayuehe.com/> 西安众泰医疗官方微博<http://weibo.com/u/2674805751>

西安第一医疗器械公司：<http://www.ztgaoxin.com> 营业时间：8:30-17:30（节假日不休，晚20：00以后产品咨询与业务洽谈请致电：15380959499）。（产品批发，团购与业务洽谈请致电：

15389059499，优惠活动请致电：029-86102370）售后维修请致电15389079989