

杭州 洗鼻器正规 防串货

产品名称	杭州 洗鼻器正规 防串货
公司名称	杭州奇炜生物科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	容量:350ML (L) 一次性使用:否 药 (械) 准字:2012第1660222号
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市笕丁路481号
联系电话	86-057188150629 18857138042

产品详情

容量：350ML (L)
有效期：24 (月)

一次性使用：否
材质：pvc医用材料

药 (械) 准字：2012第1660222号
产品注册证：浙杭食药监械 (准)
字2012第1660222号

产品注册证：浙杭食药监械 (准) 字2012第1660222号

执行标准：yzb/浙杭1296-2012

产品名称：洗鼻器

产品标准：q/qw-cx001-2012

包装规格：1只/盒

型号：通用型 洗护型 磁疗型

配置：

通用型：包括通用型洗鼻瓶 (含7字型导液专用部件) 1个，成人直流喷头和成人/儿童多用四孔减压喷头各1个。

洗护型：包括通用型洗鼻瓶 (含7字型导液专用部件) 1个，成人直流喷头和成人/儿童多用四孔减压喷头各1个，硅胶8孔环侧喷头1个。

磁疗型：包括磁疗型洗鼻瓶（含磁疗型7字型导液专用部件）1个，成人直流喷头和成人/儿童多用四孔减压喷头各1个。

适用范围：

- 1.适用于鼻腔的日常清洗护理。
- 2.适用于各类鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、感冒等引起的喷嚏、流涕、鼻塞、鼻粘膜红肿等的清洗护理。

使用方法：

- 1.将1袋（3.15g）专用洗鼻盐加入瓶内，加入温开水（以37°-41°左右为宜）至瓶体一半左右，缓慢摇匀使洗鼻盐溶解。再加温开水至350ml刻度线，盖上瓶盖，缓慢摇匀，配置成专用洗鼻液。
- 2.本洗鼻器配有成人直流喷头和成人/儿童多用四孔减压喷头二种，洗护型洗鼻器增配硅胶8孔环侧喷头一个。成人直流喷头产生的冲洗液速度较快，冲洗力量强。成人/儿童多用四孔减压喷头产生的冲洗液速度较缓，冲洗力量柔和。胶8孔环侧喷头对鼻腔内壁进行立体冲洗。使用者可根据自身情况选择合适冲洗喷头后，将冲洗喷头插入7字型导液专用部件，备用。
- 3.磁疗型洗鼻器配有专用磁化装置，
- 4.冲洗鼻腔时，头略低，身体前倾，张开嘴用口呼吸。
- 5.将冲洗喷头一端推入单侧鼻孔，根据个人承受程度，缓慢挤压瓶体，使温盐水冲入鼻孔内，再从鼻腔回流出来。如鼻腔通畅，冲洗后的水可从另一侧鼻腔流出。单侧鼻孔清洗后，换另侧鼻腔清洗，同法操作。
- 6.使用后请轻拭鼻腔内流出的水分。
- 7.请用完成后，请将瓶体、冲洗喷头、7字型导液专用部件用清水清洗干净，放于通风处晾干备用。
- 8.建议每天使用，早晚各一次。
- 9.12岁以下儿童请在家长指导下使用。

注意事项：

- 1.该产品建议专人使用，冲洗喷头严禁不同使用者之间交叉使用。
- 2.请使用者根据个人承受程度确定瓶子挤压力度，请勿用力过度。如鼻腔或耳膜压力过大，请减少压力。
- 3.不得使用过冷（或热）开水配置洗鼻水；温盐水请按照标准配置，不得使用浓度偏高（或低）的盐水。
- 4.术后患者或中耳炎患者请在医生指导下谨慎使用。

制造商：杭州奇伟生物科技有限公司

地址：杭州市下城区永华街衣锦路19号

免长途费热线：400-066-7576

电话：0571-88150629

传真：0571-88150629转809

网址：www.hzqsw.com