

兴优海水鼻腔喷雾器使用需持续喷射2、3次，每次喷药量不超过2秒，左右两侧各喷一次。

产品名称	兴优海水鼻腔喷雾器使用需持续喷射2、3次，每次喷药量不超过2秒，左右两侧各喷一次。
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

兴优海水鼻腔喷雾器使用方法

- 1.使用前请先用开水煮沸或直接从自来水龙头放冷水冲洗喷头（以消毒除菌）。
- 2.取下保护盖，在方向指示箭头上轻按，使用时请将头偏离鼻孔喷射，注意不要过于接近。
- 3.需持续喷射23次，每次喷药量不超过2秒，左右两侧各喷一次。