

手术室液体恒温箱595*570*865mm

产品名称	手术室液体恒温箱595*570*865mm
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

北京福意电器有限公司为了满足不断增长的中国市场需求，采用同步的管理、经营，依托数控设备的优良工艺，并以合理的价格立足于中国，为中国乃性能的恒温冷藏设备。用于高校、站、科研、防疫站、卫生、实验室药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

手术室液体恒温箱595*570*865mm临床用途--

低体温对手术患者的负面影响：人们往往未重视低体温对机体不利的影 响，它可导致许多并发症的发生，如凝机制障碍、药物代谢速度降低、削弱机体的免疫力、伤口愈合时间延长、感染增加、使患者术后苏醒延迟、住院时间延长，还可引起严肺疾患。福意联手术室恒温箱，在手术过程中，加温液体药品37度，优良大限度减少冷刺激，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。 本产品适可加温液体药

品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

手术室液体恒温箱595*570*865mm使用案例图片

手术室液体恒温箱595*570*865mm参数：

产品名称:FYL-YS-150L	产品名称:FYL-YS-280L额定电压:220V 额定频率:50Hz额定输入功率:160W	产品名称:FYL-YS-430L额定电压:220V 额定频率:50Hz额定输入功率:160W
额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:100W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*865mm有效容积:150L温控范围:2-48	箱体尺寸:(W*D*H):595*570*1445mm有效容积:280L温控范围:2-48	箱体尺寸:(W*D*H):595*680*1805mm有效容积:430L温控范围:2-48

噪音(声功计):42dB(A)

箱体尺寸 (W*D*H) :595*565*1440

箱体尺寸 (W*D*H) :595*675*1795

mm

mm

箱体尺寸 (W*D*H) :595*565*860m

m

内尺寸 (W*D*H) :504*487*1215mm

内尺寸 (W*D*H) :504*598*1570mm

内尺寸 (W*D*H) :504*487*634mm

有效容积:280L---

有效容积:430L---

有效容积:150L---

净重:99kg

净重:129kg

产品型号:FYL-YS-151L

产品型号:FYL-YS-281L

产品型号:FYL-YS-431L

净重:64kg

额定电压:AC220V

额定输入功率:160W

额定输入功率:200W

温度范围:0-100

额定输入功率:120W

噪音(声功计):46dB(A)

噪音(声功计):48dB(A)

手术室液体恒温箱595*570*865mm使用方法：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建

议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室液体恒温箱595*570*865mm临床相关:

冬季是低体温症发病的高峰期，低体温症发病的主要原因是有些人体内产热少，体温调节功能差。特别是老年人和婴儿，对温度的变化不那么敏感。即使室内温度低也可能感觉不到。导致保温防护能力差，当体温下降到35℃以下时，就会发生低体温症。手术中的患者容易引起低体温这一常见的并发症，特别是长时间的大型手术，多发生在手术麻醉中，发生率为60%-80%。低体温可能影响心血管系统、增加手术位的感染风险、增加失血量和增加寒战的发生率。手术期间引起低体温的原因有以下几点：1. 麻醉引起的体温调节分布，麻醉1小时后，体核温度降低1-1.5℃。2.大多数手术室都保持在22℃-24℃的低体温状态。3.腹和胸手术中打开体腔，皮肤的长期暴露