

三强环氧乙烷灭菌器低温灭菌消毒柜内镜手术器械整形医院

产品名称	三强环氧乙烷灭菌器低温灭菌消毒柜内镜手术器械整形医院
公司名称	郑州三强医疗器械销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区京广南路西、代庄街北1号楼1单元22层22009
联系电话	15249621366

产品详情

依靠环氧乙烷气体在一定的湿度压力下达达到完成彻底的灭菌，环氧乙烷气体直接破坏微生物蛋白质，阻止其新陈代谢，可以杀灭顽固的各种杆菌

适用范围：宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅压传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食道扩张器、电灼器械、除颤电极、激光机头、金属类、玻璃类、棉纺类、硅胶类、橡胶类、各类导管导线以及各种医用耗材包含中药、西药、人体植入物、DNA等

不能对液体、粉剂；不能穿透铝箔、金属、玻璃、陶瓷等物质

规格参数】

【商品名称】环氧乙烷灭菌器

【产品型号】SQ-XH120

【产品形式】手动门立式

【加热方式】电加热

【功率】3.0kVA

【电源】AC220V 50Hz

【外形尺寸】（长×宽×高）：976×790×1715mm

【内胆尺寸】（长×宽×高）：700×450×400mm

【有效容积】 126L

【重量】 175kg

【显示器】 液晶触摸屏

【灭菌室材质】 铝材 5052

【外箱材质】 ABS板（厚 5mm）喷漆

【灭菌时温度】 50 ± 3

【工作压力】 -60kPa

【高抗压力值】 -80kPa

【灭菌时湿度】 40%-85%

【选用气体】 纯环氧乙烷气体

【灭菌时间】 0-999 小时可调

【真空时速】 15 分钟内抽至-60kPa

【储水量】 外接蒸馏水源，分解水箱 2.2L

【一次灭菌用水量】 蒸馏水用水量<80mL,分解水用水量<10L（与水压的大小有直接关系）

【空气替换】 自动化换气，周期换气 5 次，间隔 15 分钟一次

【显示状态】 显示运行状态、温度、湿度、压力、灭菌时间、残气处理时间、次数、蒸汽发生器温度

【打印机】 采用微型打印机，打印出灭菌全过程中各项数据，可做性保存

【湿度传感器】 内置湿度传感器自动检测灭菌灭菌室内湿度

【压力变送器】 内置压力传感器自动检测灭菌灭菌室内压力

【温度传感器】 内置温度传感器自动检测灭菌灭菌室内温度

【真空系统】 采用无油真空泵

【密封门】 5052 优质铝材门板，厚度 20mm，钥匙开启，抗压力 200kPa

【加湿系统】 负压状态下脉冲式蒸汽加湿

【空气过滤装置】 过滤器对粒子直径>0.3 μ m 的滤除率，不少于 99.5%

【灭菌室泄漏率】 泄漏率的测定在空载、灭菌室温度不变，测试压力为-70kPa，测定时间 15min 的条件下进行，测定时间内平均泄漏率 0.13kPa/min

【自动加药】灭菌室内置式刺穿技术

【加热系统】采用阻燃防爆型电加热系统，六面加热

【多种防护功能】设有过压、漏电、超温保护功能，更加安全可靠

【报警系统】有高、低温报警系统，低压报警系统，蒸汽高温报警系统，泄漏率检测报警系统，密封门检测报警系统，加药检测报警系统

【断电记忆功能】灭菌过程中如果断电，再次送电后屏幕会提示“是”“否”继续上次运行。此时可以选择“是”继续上次运行。也可以选择“否”取消运行。若是十分钟无人操作，系统会默认选择“是”，继续运行断电时工作状态