

【多呢尔DNR】低温等离子手术设备妇科超精细微创手术

产品名称	【多呢尔DNR】低温等离子手术设备妇科超精细微创手术
公司名称	株洲得尔电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:多呢尔DNR 型号:A380 产地:湖南株洲
公司地址	湖南省株洲市天元区橡果路9号生产车间101618、619号
联系电话	15807330766 15570763506

产品详情

多呢尔DNR等离子刀在妇科中的运用

一、多呢尔DNR等离子刀的概述

多呢尔DNR等离子刀采用当今先进科技420KHZ定向射频电波发射技术，在发射极局域组织内形成聚集的射频电波场，射频能量直接激发组织内的液态极性分子产生等离子振荡（布郎波振），脉冲式的波振动能使组织分子键断裂，并同时产生分子波振摩擦热，在低温（40 ~ 70 ）状态下，即可达到精细微创的切割效果，分子波振磨擦热效应，被用来止血，组织消融和收缩。

二、多呢尔DNR等离子刀的主要特点

- 1、天线板不同于负极板、浅表接触皮肤、无电流通过人体、无灼伤可能、安全性高。
- 2、电极细微、不发热、切割jingque、热损伤小于15微米，无侧热量传导、无侧组织灼伤、真正的微创，不影响病理检查。
- 3、无压力切割、手术挥洒自如、灵巧jingque。
- 4、无炭化、烟雾少、出血少、不粘连、视野清晰。
- 5、疼痛减少、留下的疤痕少、出血少、术后愈合快。

6、电极种类多、手术时间短、治疗范围广。

三、多呢尔DNR等离子刀的手术指征包括在细胞学和阴道镜下：

- (1)怀疑CIN2,CIN3；
- (2) 怀疑宫颈早期浸润性癌或原位癌；
- (3) 持续CIN1或CIN1患者随访不方便；
- (4) 怀疑宫颈ASCUS或有症状的宫颈外翻等4种情况。本研究结果支持此适应证。

四、多呢尔DNR等离子刀手术适应症的范围

1. 细胞学或阴道镜下取活检怀疑宫颈上皮内瘤样病变（CIN）；尤其怀疑CIN 2-3 时。
2. 怀疑宫颈早期浸润癌或原位癌。
3. 久治不愈慢性宫颈炎。
4. 持续CIN或CIN随访不便者。
5. CCT提示ASCUS,或有症状的宫颈外翻。
6. 宫颈管内赘生物（大息肉、多个息肉、大囊囊等）；
7. 宫颈尖锐湿疣。
8. 宫颈CIN并合性湿疣。

五、多呢尔DNR等离子刀前注意事项

- 1、月经干净3~7天进行，术前3天禁止同房。
- 2、术前需查血常规及凝血功能。
- 3、患有内外科急性疾病患者，如发热，不宜手术。
- 4、有内外科疾病：如心脏病要慎重选择手术。

六、多呢尔DNR等离子刀术后注意事项

创面需要约2个月的时间愈合，在此期间，尽可能避免同房，因为同房不仅会因机械刺激影响宫颈创面的愈合，还可能引起阴道炎症，从而影响宫颈正常组织的修复。治疗后，往往由于创面的愈合，会出现大量的阴道排液，有时会带来一定不便。要注意保持外阴的清洁，勤洗外阴，但不要自行使用阴道栓或进行阴道冲洗。

并且还要勤换内裤，必要时使用卫生垫等。在治疗后的一两个月，要到医院复查，了解宫颈创面的愈合

情况，以便早日康复。在术后一周复查，记录创面修复情况，阴道出血及分泌物情况，追查病理结果；术后第一次月经干净后再次复查，了解宫颈修复情况，必要时可辅助其它局部治疗。