

ES-300高频电刀 同一手术 两个医生同时进行手术

产品名称	ES-300高频电刀 同一手术 两个医生同时进行手术
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-300高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778

注册证见首页：荣誉资质处

一：技术参数

1：适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

2：输出功率 300W

3：输出频率 400KHz

4：输入功率小于等于1000VA，环保节能

5：CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

*6：具有10种以上工作模式，其中单极电切模式 4种，单极电凝模式 3种，双极电凝模式 3种

7：纯切性能：1~300W（负载 500 ），要求功率连续可调

8：混切性能：1~250W（负载 500 ），要求功率连续可调

*9：单极凝性能：1~120W（负载 500 ），要求功率连续可调，最大输出电压 4800V

*10：双极性能：1~150W（负载 100 ），要求功率连续可调

*11：喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调

*12：喷凝和强凝工作模式峰值系数 6.0

13：四种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用；混切3用于切割时带有zuihao止血效果时使用

14：三种单极电凝模式：柔凝能够达到最大的电凝深度，防止组织碳化，大大降低电极对组织的粘连；强凝非接触凝血，但输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血；喷凝无接触高效表面电凝，透入深度浅，通过蒸发来去除组织，通常使用刀型电极或者球形电极凝血

*15：三种双极模式，带有双极切割和凝血功能：宏模式进行双极切割或快速凝血时使用。电压较高，比标准和精细模式功率大；标准模式适用于大多数双极应用。保持低电压，以防止出现电火花；精细模式用于高精度和精细控制干燥量时使用。保持低电压，以防止出现电火花

*16：凝血模式采用带控的功率输出曲线：在组织出血低阻抗情况下快速提升至最大功率输出达到快速止血效果，在凝血完成到达高阻抗情况下快速降低输出功率达到避免组织碳化的止血效果

热效应产生的凝血止血.>蛋白质“凝固”..缓慢汽化细胞内液体使细胞收缩和干燥从而封闭血管组织失去活性>肿瘤损害

.....