

电动按摩减肥腰带 疯狂甩脂加热燃烧脂肪

产品名称	电动按摩减肥腰带 疯狂甩脂加热燃烧脂肪
公司名称	深圳市盛阳康科技有限公司
价格	130.00/条
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区新生村龙凤路43号
联系电话	0755-85207916 13418547386

产品详情

疯狂甩脂减肥腰带可按摩加热瘦身燃脂 syk-318

腰部：塑造和加强背部肌肉，减轻长期坐着或长期保持不良姿势而引起的疼痛。

腹部：调整腹部肌肉，收缩腰部，改善消化能力。

臀部：刻画坚实的体形，塑造更自信的外形。

大腿：让松弛的大腿变的紧绷。

颈部/肩膀/上背部：缓解关节炎、风湿病及相关姿势问题引起的疼痛，放松僵硬的肩膀。

优点：
瘦身功能可帮助您取得理想的体型。配合适当的节食。它会成为燃烧脂肪和减轻体重的有效方法。独特的椭圆甩动可以帮助塑造健美的身段。在家中享受放松和舒爽的按摩，可减轻紧张感和压力。有助消化，且具有多种不同的强度以适应您的偏好和要求。

甩脂机的特点: 它是一款创新产品，采用了最新科技，能为您提供有效的椭圆甩动按摩。设计符合人体工程学，确保了最大程度的舒适性。带有6级速度和强度调节的自动和手动按摩模式。轻便的遥控器让操作变的简单便捷 简洁的面板显示使您对按摩运动的状态一目了然。时尚的手提包可轻松存放塑身魔法师，便于您随身携带。

主要配置：遥控器 电源适配器 电源线

使用方法和建议:

1.使用方法: 连接电源转换器和甩脂机，将交流插头插入电源插座

将甩脂机围绕在想要按摩的身体部位，谨慎地扣紧并保持舒适 按电源按钮，甩脂机便可使用
选择手动和自动模式 手动模式下，有6种速度可选择 自动模式下，速度自动调节。
使用过程中，手动与自动模式不能互换 按电源按钮完全关闭本产品，所有的批示将会熄灭

2.建议: 建议低速按摩开始，然后再逐渐增加速度。

低速按摩可促进血液循环，而高速按摩则专用于刺激较大的肌肉组织，例如背部和股四头肌
建议甩脂机在身体任一部位的总使用时间为10分钟 不用本产品时，请务必将插头从插座上拔出。

安全注意事项:

1.用户的适用性: 如果您属于以下的情况，使用前征求医生意见；正在服 期或感觉不舒服 恶性肿瘤
心脏病 怀孕期或月经周期 病假或医嘱休息
脊椎病，或由于事故或疾病引起的脊髓弯曲和其它异常情况。

2.注意: 使用后或清洁前，请取出总电源插头。请勿在洗澡或淋浴时使用甩脂机。

请勿将甩脂机浸入水中，请勿使用甩脂机靠近水源。

如果甩脂机不小心掉入水中，请立即从电源插座上取出交流电源插头

在任何情况下都不允许在甩脂机电源开关仍然开启时，将手伸入水中捞起甩脂机

接通电源时，请勿离开甩脂机

请勿在摆弄电线或在电经受损的情况下使用甩脂机。要检查甩脂机时，请与服务中心联系。

排毒 排毒意即将体内聚集的毒素排出体外。毒素乃残害人体健康的有害物质，可通过污染、皮
肤接触、不良饮食，甚至压力渗入体内。压力影响消化并造成便秘、腹胀等，进而增加残留在消化道内
的毒素。排毒功能不好也会影响人体免疫系统，以致影响健康。其中一个功能就是增强人体的排毒功能
。它针对肚脐下3寸的关元穴进行刺激，而关元穴的作用就在加强人体对养分的吸收及对残渣的排泄。

按摩 按摩是最古老的治疗方法。主要用于消除肌肉僵硬，同时也可以消除腿部抽筋。按摩的另
一重要功能是促进血液与淋巴循环系统的运作。这两个系统对排毒和人体免疫有至关重要的作用。

血液循环系统负责将血液送往各个器官而淋巴系统则将毒素及废物送往淋巴结过滤，再由血液带走
，如果两个系统无法正常工作，我们的健康将受影响。按摩有助于刺激两者的运作而syk-318是利用其回
旋的运作进行有效的按摩以加强血液与淋巴循环系统的运作功能。 注意事项 1

· 选用按摩速度时请按个人身体状况及需要。使用时也要确保贴带适度贴紧。 2

· 由于个人皮肤对外来刺激有不同反应，因此建议使用时穿着衣物。 3 · 自动程序是以10分钟为准。

如果您要在同一时间按摩不同部位，您可利用手控程序进行选择。若是单一部位，您可直接选择3个程序
中的一种。不过，建议不要在同一部位连续使用超过20分钟。 4 · 请勿在餐前餐后一小时内使用。

5 · 深度静脉血栓患者、恶性肿伤患者、心脏衰竭患者、孕妇、幼儿禁止使用。

6 · 使用时若感不适请即刻停止。7.请勿在高温、高湿度处使用。 8 · 当按摩带持续使用长时间后，
为防过热，内部防热装置会自动启动以致按摩带会暂时停止操作。只需让机件的温度冷却至安全水平即
可再次使用。 9 · 若电线、插头或变压器损坏时请暂勿使用。

10 · 请勿尝试自己或让非授权者打开或维修按摩带。

11 · 请勿将重物置放在按摩带上或在使用时施与过度压力。

12 · 使用后请将插头拔下，将按摩带放置在小孩拿不到的地方。

平腰腹 人体1/3脂肪堆积在腰腹部，利用强力震波将沉淀的脂肪分解为细微粒子，并排
出体外。同时可加速人体血液循环，疏通经络，促进新陈代谢。

碎体脂 可根据需要在不同地方进行振动、捶打式循环按摩，震动物器释放每分钟3000次的强力震波，激活全身淋巴系统加速渗透，快速排脂，粉碎脂肪链，将腰腹超大脂肪团打碎，使半固态的脂肪变为液体，再被淋巴结分解为甘油及甘酸分子状态，然后随尿液、汗液排出体外溶解，使腰围迅速收缩。

塑曲线

帮助全身将多余脂肪迅速消耗，强力震波将局部肌肉匀称收紧，燃烧多余脂肪，使全身曲线玲珑有致，是“分量”女性和“肚腩”男士最理想的塑身产品。

操作说明 1. 将电源dc头插入腰带电源连接孔内。

2. 将开关电源插头插入交流电源插座，腰带通电后发出一声“嘟”响，表示腰带已通电。

3. 按一下“电源”按键即可启动腰带，并以第一种模式(手动模式)低速运行。4.本腰带提供三种模式：手动模式、自动增减模式、自动正反转模式。可根据自身需要通过按“模式”键进行选择。

5. 在手动模式及自动增减模式中可通过按“正反”键进行马达运行方向转换。6. 在手动模式及自动正反转模式中，若需要不同的振动强度，可通过按“增强”/“减弱”键对振动强度进行调节。7. 本腰带额定工作时间10分钟，10分钟后腰带将会自动停止工作。若需再次使用可重复3~6步骤，建议每次连续使用不要超过20分钟，如果腰带连续长时间运行，机器会因过热而自动停止工作，待温度降低后，方可自行恢复到待工作状态。8. 使用完毕后，请先将开关电源关闭，拔出电源插头，再将dc头与腰带分离。疯狂甩脂瘦身按摩腰带是根据运动科学中的“训练与还原”运动原理对脂肪聚集的部位进行刺激,将脂肪分解成小块状并脱离脂肪层,就能达到辅助瘦身的目标。

它提供对健康有重要作用的三项即瘦身、排毒与按摩功能。配合适当饮食与运动，这些功能对人体的动作有着极其重要的功能。

公司简介

我公司是一家高科技的集团公司,前身香港盛阳康科技有限公司，主要致力于保健按摩器材和高科技电子产品研发和生产.公司现有的十余个部门构建出了公司完善的生产规模.在科学管理的基础上,公司凭借着自己雄厚的经济实力,敏锐的市场洞察力,快速的行动力,已在保健器材这块领域占居了自己的一席之地,并赢得了同行业的赞誉和认可.现公司重点发展下属的研发部及生产部,从而形成了以高科技产品研发的生产为基础,以国际商贸为龙头的工商贸一体化的全面发展格局.因此公司不论从经济实力,企业管理,对市场的

把握,还是从产品本身的科技含量和品质来看是一家很有发展潜力的企业,而公司效益的一直稳步提高,资产的不不断成倍增长,更有力的证明了这一点.

公司下属实业部在医疗、运动、按摩、保健器材等产品的开发和生产上,拥有一批国内、外一流的精通中、西医理论和人体经络的专家,及一批对电脑、电子、激光、机械等方面的高新技术非常精通的工程师,高素质的人才也造就出了高品质的盛阳产品,和高信誉的盛阳形象.从产品的结构设计、电子机械开发、电脑编程到手工制版、模具生产和成品装配,我们已形成了生产一体化和规模化.而不断创新的'盛阳康'系列产品,更是紧跟着时代的步伐,经历了市场的考验,赢得了良好的国际声誉和多项专利.'盛阳康'产品投放市场以来,一直受到国内外销售商的青睐和喜爱,同时也掀起了一次又一次的消费热潮,并为全球各国家知名品牌 'oem' 'odm'.在竞争日益激烈的市场中,我们盛阳康的人抓住机遇,不断完善自我,始终以'为客户提供最优质的产品和服务,用我们的优良成绩回馈社会'作为我们的奋斗目标,

不断开拓进取,播种健康,造福人类.在世界的大舞台上,盛阳康科技有实力,有责任,有信心来完成我们盛阳康人要对健康事业做贡献的宿愿!