

ES-200高频电刀 火花控制技术的凝血

产品名称	ES-200高频电刀 火花控制技术的凝血
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

ES-200是一款具有8种工作模式的多功能高频手术设备，其中单极电切模式3种，单极电凝模式3种，双极模式2种，几乎满足外科多种手术电刀合一的便捷性，同时其内置接触质量监督系统，监测高频漏电流，为外科手术提供方便。

在高频使用中应注意以下问题：

3.手术中的高频电刀会产生火花、弧光。易燃易爆的气体液体或者消毒剂等应该远离高频电刀。手术前应该排除病员机体孔洞中可能存在的易燃易爆的气体，尤其是酒精，酒精燃烧后的火苗看不见，危害性更大。 4.高频电刀在安装心脏起搏器的病人身上不建议使用，高频电刀可以干扰起搏器使其停止工作。高频不得直接作用于患者心脏；指状或者蒂状组织如小儿阴茎不得使用电刀。

5.切忌盲目加大输出功率，功率大小以满足手术效果为限。一般手术功率输出建议在30W---70W之间使用，如有特殊需要（例如截肢）建议功率不要超过200W。在机器使用之前和使用之后应该保证机器的功率处于最低，从而保证直接加在病员机体的功率是最安全的。