

# ES-200高频电刀 8种工作模式的多功能电刀

产品名称	ES-200高频电刀 8种工作模式的多功能电刀
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

## 产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

一款应用科室广泛并拥有极高性价比的多功能高频手术设备，具有8种工作模式，其中单极电切模式3种，单极电凝模式3种，双极模式2种，几乎满足外科多种手术电刀合一的便捷性，同时其内置接触质量监督系统，监测高频漏电流，为外科手术提供anquanbaozheng。适合于普外手术、骨科手术、妇科手术、耳鼻喉科手术、神经外科手术、皮肤整形美容手术、口腔颌面手术等手术应用。

高频电刀操作流程(1)病人是否佩戴金属及，有无金属植入物，是否安装yongjiu性心脏起搏器等。(2)病人身体是否接触手术床及其他装置的金属部分。2.准备高频电刀设备及无菌单极线及双极电凝线。3.将高频电刀的电源插入三相电插座。4.将脚踏开关端口插入高频电刀相应插口。5.打开高频电刀电源开关，确认机器自检，回路电极板报警，REM红灯闪烁6.连接回路电极，将回路电极板粘贴在病人身体适当位置，REM绿灯闪烁，报警接触。7.洗手护士将电极电刀，双极电凝线分开固定于手术台，勿缠绕在金属器械上，主机接口端传给巡回护士，将其插入高频电刀对应插口。8.选择合适的输出功率及输出模式，一般手术输出功率为30-70w。9.请手术医生利用手控或脚控方式测试电刀输出备用。10.使用过程中洗手护士应及时用电刀清洁片清除电刀头有机物焦痂，暂时不用时将电刀放置于绝缘保护套内，发现电刀头功能不良时应及时更换。11.手术结束时关闭电源开关，拔出单双极电源线，拆除电极板，拔出电源线，清洁整理设备。