

LINZ-9A单通道微量注射泵 上海雷恩

产品名称	LINZ-9A单通道微量注射泵 上海雷恩
公司名称	上海雷恩医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷恩 型号:LINZ-9A 产地:上海
公司地址	上海市松江区徐塘路168号2幢2层南侧厂房
联系电话	86-021-54500150 15800330013

产品详情

型号：LINZ-9A单通道微量注射泵

外型尺寸：306 (L) * 126(W) * 141(H)

重量：1.8kg

内置式电池连续使用时间：供单通道8小时（全新电池完全充电情况下以中速5ml/h运行时）

消耗功率： 27 VA

电源：交流电源：AC 100-240V. 50/60Hz (± 1Hz) ；内置式电池：DC 12v 1800mAh

型号：Ni-MH, 可充电

注射流速及分辨率：流速设定范围：0.1ml/h-1600ml/h；小分辨率为：0.1ml/h

适用注射器：5/6ml，10/12ml，20/25ml，30/35ml，50/60ml

快速注射速率：50/60ml注射器：1600ml/h；30ml注射器：900ml/h；20ml注射器：600ml/h

10ml注射器：400ml/h 5ml注射器：200ml/h

注射总量及分辨率：总量设定范围：0.1ml-9999.9ml；小分辨率：0.1ml

输液精度：±3%(注射精度：±2%；机械精度：±1%)

阻塞报警阈值：高：110kpa ± 20kpa (825mmHg ± 150mmHg)

中：80kpa ± 30kpa (600mmHg ± 225mmHg)

低：60kpa ± 20kpa (450mmHg ± 150mmHg)

输液模式：ml/h 模式. 总量时间模式. 剂量体重模式

KVO: 0.1-5ml/h可选

使用环境：环境温度：5 ~ 43

相对湿度：90%RH (无凝露状态)

大气压力：860hpa-1060hpa

储存环境：环境温度：-20 ~ +55

相对湿度：90%RH (无凝露状态)

大气压力：860hpa-1060hpa

防水等级：IPX4

电击防护：I类CF型

LINZ-9A单通道微量注射泵报警功能：

保持静脉畅通 (KVO) : 预定量注射结束后，为防止血栓的形成，仍以约定低速度 (0.1-5ml/h) 注射。

电源切换功能：

当交流电源断电时可以自动切换成内置式电池供电，并提示；当交流电接通时自动转换为交流电工作。

再报警功能：操作人员按下静音键后约1分30秒，如果产生该报警的原因没有得到有效处理，报警声会再次响起，以提醒操作人员解决问题。

数据记忆功能：保存近一次设置好的音量等级. 品牌. 阻塞压力等级等，以备下次使用。记忆长的时间为5年。

电池保护报警：为保护电池和保证注射安全，电池电量从接近不足到即将耗尽，分级声光提示。

移动：当试图移动或取走注射器时会提示移动。

其他功能：

阻塞.接近完成.完成.待机报警，电源指示，注射总量设置查询，注射流速和已注量实时显示。

LINZ-9A单通道微量注射泵其他功能：

AC100-240V 宽电压适用于多种使用环境。

三通道3个液晶屏可独立操作，可以双泵工作或任意一个单泵工作。

高流速安全确认功能，大于300ml/h提示二次确认，安全避免误操作。

数据清零功能，安全注射更安全。

自动识别各种品牌注射器规格。

注射过程中键盘锁定，更加安全。

CPU监控，性能稳定，可靠性高。

符合GB9706.1-2007 医用电气设备安全通用要求；GB9706.27-2005输液泵和输液控制器安全专用要求；YY0709-2009医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南；YY0505-2012医用电气设备安全通用要求 并列标准：电磁兼容。