

迈克大夫非接触额温枪 FR1DZ1

产品名称	迈克大夫非接触额温枪 FR1DZ1
公司名称	厦门市湖里区福琪医疗器械经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区仙岳路2019号
联系电话	86-05928269653 13950192423

产品详情

产品介绍1.一秒红外侦测技术 2.非接触式测量，避免交叉感染 3.可以连续测量 4.30组记忆功能 5.高烧警示 6.绿色/红色背光显示 7.华氏度与摄氏度单位切换 8.非置入式测温 9.量测蓝色光源提醒

10.体温值微调功能(按照使用者需求，可以通过微调功能上下加减2.5)

11.额温、腋温、肛温、环境温度多重模式调节使用 12.测温范围：0-100 产品属性1.多重用途（大范围的测量）microlife红外线万能一秒额温枪,测量范围从0 到100 ；本产品可以测量额温，同时也可以用来

测量下列物体的表面温度: * 奶瓶里的牛奶表面温度 * 婴儿洗澡水的表面温度 * 环境温度 * 食品温度2.准确又可靠由于独特的探头件结构，先进的红外线感测器，以及完整的校正程序，本产品可以提供非常准确又可靠的额温测量功能。

3.轻松好用 * 特殊的人体工学设计让使用者可以很容易的使用本额温枪。 * 使用microlife红外线万能一秒额温枪，不会妨碍正常的生活,即使在小孩睡着时也能进行测量。 * 对儿童使用microlife红外线万能一秒额温枪时，简单迅速，轻松愉快。 * microlife红外线万能一秒额温枪

对儿童言不像肛温计那样容易感觉不舒服,而且使用起来也比口温计迅速简便。4.自动显示记忆 本产品

在开机时会自动显示上一次读数2秒之久。5.安全又卫生 * 没有玻璃裂或吞下水银的风险 * 用在儿童身上完全安全 * 非置入式测温--卫生6.发烧警示 当测量读数超过37.5 时，本产品会以10声急促短响警告病人和屏幕红色显示进行警告，他可能发烧了.其他说明问：fr1dz1额温计具备多模式下的测温

功能，那怎么才能调到我要的模式呢？答：一、物体及环境温度模式的调节：1、按下o/i键开机，直到屏幕中 或 符号开始闪烁；2、将侧面的按钮往额温计手柄部位滑下，同时屏幕中显示一个小屋符号，这时候表示额温计已经进入到测量物体环境等温度的模式；二、人体温度模式的调节：1、按下o/i键开机，直到屏幕中 或 符号开始闪烁；2、将侧面的按钮往额温计手柄部位滑下后马上推上，同时屏幕中显示一个躺着的小人符号；3、然后按start键来调节使用者需要测量的人体体温下的相关模式，(小人符号头部闪烁时表示进入口温模式，小人符号躯干和手臂部位闪烁时表示进入腋温模式，小人符号腿部闪烁时表示进入肛温模式)；4、调好后保持大约3秒钟，机器会自动进入备机状态， 或 符号开始闪烁，调节完成。(注意：这款额温计属于智能型红外额式体温计，在调整到需要的相关人体模式后，机器会自动调节人体不同部位的生理温差，所以在测量人体体温时测量的部位始终是在被测量者的额头部位)交易说明

电源：d.c.3.0v aaa电池2颗尺寸：150.4(长)mm x 38.9(宽)mm x 42.3(高)mm ± 2mm重量：84g ± 5g(含电池重量)，61 ± 5g(不含电池)