

安信医学技术开发有限公司产品

产品名称	安信医学技术开发有限公司产品
公司名称	陕西安信医学技术开发有限公司
价格	.00/件
规格参数	315:7.5*35CM 415:10*40cm 425:10*75cm
公司地址	陕西省西安市蓝田县西北家具工业园聚贤路29号
联系电话	18049408024 18049408024

产品详情

产品构成

1、基布【玻璃纤维布】

陕西安信高分子绷带、夹板采用【台湾纱线】作为基布材料，其强度适合医疗行业使用、弹力在国家药监局报批范围内布料颜色白、无毛刺、目前生产工艺复杂，价格高（小企业不用）

（1）安信玻纤基布选用标准及优点

陕西安信玻纤基布选用标准及优点

陕西安信

其他厂家

玻璃纤维布选用标准

安信采用台湾生产500度高温闷烧的高温布，无毛刺、不会刺伤患者

采用280度中温布 中温布料毛刺大 临床使用容易刺伤患者

编制方法

安信采用钩编、经编混合编织方法钩编、强度更大，透气性更好

采用钩编的编制方法 强度有了但是透气性不好

编制采用针法

安信采用每平方米13—15针，每米重量 26 ± 2 克布料，

弹力上拉伸测试 复合要求

采用每平方米9针布料，缺点强度小，布料拉伸容易变形

2 基 布【夹板上、下纸】

陕西安信

其他厂家

针刺无纺布（下纸）

采用日本进口长绒拒水材料。拒水能力强

(蓬松、舒适度高)

国产短绒拒水布，拒水能力差，成品容易产生聚氨酯渗漏。出现漏点，医生常说的发黑发霉 (蓬松了容易渗漏)

水刺无纺布（上纸）

采用日本进口长绒拒水材料。拒水能力强、折皱后不会产生聚氨酯渗漏

采用国产短绒拒水材料。拒水能力差、折皱后不会产生聚 氨酯渗漏

3 化工原料

陕西安信

其他厂家

原料产地

进口原料纯 99.999%美国 通用、陶氏 德国拜耳

国产99.9%北京、山东化工研究所

稳定性及保质期

稳定性，好保质期长6个月

产品稳定性差，保质期3个月

是否固化

不宜变硬

3个月后会明显出现产品发硬，影响临床使用效果

进口比例

安信80%以上进口原料

70%以上均为国产原料

4包 材

陕西安信

其他厂家

内袋包装

安信铝箔袋采用进口材料4层复合材料 密封性好，密封后压力测试

200公斤

包装袋3层国产材料

包装盒 包装箱

进口原生木浆牛卡

大小瓦楞设计

外箱抗压80公斤

包装箱采用国产牛皮纸

防潮性

防潮能力强

一般

原材料

预处理

所有布料均需经过70 高温干燥24小时以上。

普通干燥

生产

环境

生产环境为30万级洁净层流车间，生产车间及生产设备空气环境高于同类厂家5个百分点

不详

储存

环境

成品库房 温度控制在15 -25 。

室温保存

三、高分子绷带、夹板产品说明

(一) 高分子绷带

1、产品说明：

【商品名】高分子绷带

【批准文号】陕西食药监械（准）字 2013第1640214号

【功能主治】骨科的固定，整形外科的矫形具，假肢辅助功能用具，支撑工具。可彻底替换传统的石膏绷带和夹板的新型高科技骨伤外固定产品。

2、产品的特点：

可彻底替换传统的石膏绷带和夹板的新型高科技骨伤外固定产品

特点：（1）坚固、轻便（2）固化时间短（3）透气、透X线（4）干净、卫生、环保（5）可塑性强、操作方便。

3、安信高分子绷带使用方法（1）根据需要固定部位，选择合适的规格。（2）在固定部位用棉卷或棉套作为衬垫。（3）戴上乳胶手套。（4）打开包装，取出绷带，在常温水中浸泡2~3秒并挤压2~3次，取出后挤去多余水分。（5）根据需要呈螺旋形缠绕，松紧度适中，非支撑部位3~4层，支撑部位4~5层。（6）根据需要进行塑形，凝固时间3~5分钟，塑形需在此时间内完成，20分钟后即可完全承重。（7）用普通的电动石膏锯拆除。

4、规格及型号

安信高分子绷带 ANSEN CAST

型号Art.No

规格Size

包装Packing

颜色Color

AX002

5.0cm × 360cm

10袋 × 12盒\箱

10bags/box,12boxes/ctn

白、绿、红、黄

White,Green,Red and Yellow

AX003

7.5cm × 360cm

10袋 × 12盒\箱

10bags/box,12boxes/ctn

白、绿、红、黄

White,Green,Red and Yellow

AX004

10cm × 360cm

10袋 × 9盒\箱

10bags/box,9boxes/ctn

白、绿、红、黄

White,Green,Red and Yellow

AX005

12.5cm × 360cm

10袋 × 9盒\箱

10bags/box,9boxes/ctn

白、绿、红、黄

White,Green,Red and Yellow

AX006

15cm × 360cm

10袋 × 9盒\箱

10bags/box,9boxes/ctn

白、绿、红、黄

White,Green,Red and Yellow

5、可提供支持

(1)及时提供货源，确保全国范围内2~3天内到货；(2)企业会持续稳定给予代理商做全面服务工作；(3)提供合法的经营手续。

(二) 高分子夹板

1、产品说明：

【商品名】高分子夹板

【批准文号】陕西食药监械（准）字 2013第1640213号

【功能主治】

骨科的固定，整形外科的矫形具，假肢辅助功能用具，支撑工具。烧伤科的局部防护性支架等。

2、产品的特点：

可彻底替换传统的石膏绷带和夹板的新型高科技骨伤外固定产品

特点：（1）坚固、轻便（2）固化时间短（3）透气、透X线（4）干净、卫生、环保（5）可塑性强、操作方便。

3、安信高分子夹板使用方法

（1）根据需要固定部位，选择合适的规格。（2）打开包装取出夹板，在常温水中浸泡3~4秒并挤压2~3次。（3）取出后挤出多余的水分，并用毛巾吸收夹板表面的水滴。（4）覆盖在需要固定的部位，塑形后用纱布绷带或弹性绷带缠绕固定。（5）3~5分钟开始硬化，20分钟后可完全承重。

4、规格及型号

安信高分子夹板 ANSEN SPLINT

型号Art.No

规格Size

包装Packing

适用部位Operating part

AX315

7.5cm × 30cm

20袋 × 6盒\箱

20bags/box,6boxes/ctn

上臂

Upper arm

AX325

7.5cm × 90cm

10袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

上臂

Upper arm

AX415

10cm × 40cm

20袋 × 6盒\箱

20bags/box,6boxes/ctn

前臂

Forearm

AX420

10cm × 50cm

10袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

小腿

Shank

AX425

10cm × 75cm

10袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

小腿

Shank

AX430

10cm × 60cm

10袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

小腿

Shank

AX535

12.5cm × 75cm

10袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

小腿

Shank

AX545

12.5cm × 115cm

5袋 × 6盒\箱

5bags/box,6boxes/ctn

大腿

Thigh

AX635

15 cm × 75cm

10袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

大腿

Thigh

AX645

15 cm × 115cm

5袋 × 6盒\箱

10bags/box,6boxes/ctn

大腿

Thigh