

犬伤创口冲洗消毒机-预防接种门诊伤口冲洗设备

产品名称	犬伤创口冲洗消毒机- 预防接种门诊伤口冲洗设备
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:规范化犬伤冲洗 功能:加热带打印 耗材:专用犬伤冲洗液
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号(注册地址)
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

犬伤创口冲洗消毒机-预防接种门诊伤口冲洗设备是狂犬病专业清洗设备，通过对水流、水温、水压和清洗时间的控制和调节，使用犬伤弱碱性专用清洗消毒剂，利用高压喷枪对深浅伤口进行有效清洗，显著了狂犬暴露患者伤口的清洗效率,减少了暴露时间，避免了传统用肥皂水和流动清水交替冲洗浓度、温度难以把控、深部伤口清洗水压达不到、清洗效率低的缺点，使犬伤伤口的清洗处理更加科学规范，大大降低了狂犬病发生的风险。近年来，随着饲养猫狗等小动物的人越来越多，人宠之间的接触也越来越频繁，再加上人们对管理不善，被小动物咬伤的事件时有发生，咬伤后时间清洗和消毒伤口是预防狂犬病首要而关键的一步，可以减少近50%的发生率，但是常常被大多数人忽略，狂犬病一旦发病，死亡率几乎为100%。

1、什么是狂犬病？狂犬病又叫疯狗病或恐水症，是由狂犬病毒导致的共患急性传染病。人得了狂犬病后的特征临床表现为恐水、畏光、吞咽困难、狂躁等，最后死于呼吸、循环和全身衰竭。
*警惕：一旦发作尚无有效手段，病死率几乎100%！
2、动物咬伤后怎么办？及时处理伤口。用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。使用狂犬病被动免疫制剂（狂犬病人免疫球蛋白）。根据需要可选择使用，能特异地中和狂犬病病毒，可立即起效。
3、狂犬病疫苗如何接种？四针法（2-1-1程序）：第0天接种2剂（左右上臂三角肌各接种1剂），第7天和第21天各接种1剂，共接种4剂。五针法：第0、3、7、14和28天各接种1剂共接种5剂。犬伤伤口分级：

级暴露：完整皮肤接触或者喂饲风险动物；完好的皮肤被舔。

无风险，需清洗暴露部位，无需进行医学处置。

级暴露：裸露的皮肤被轻咬；无明显出血的轻微抓伤、擦伤。低风险，要进行专业伤口处置及疫苗接种。确认为级暴露且严重免疫功能低下者，或者级暴露位于头面部且致伤动物不能确定健康时，按照级（高风险）暴露处置。
级暴露：单处或多处贯穿性皮肤咬伤或者抓伤；破损皮肤被舔舐；黏膜、开放性伤口被污染；直接暴露于蝙蝠。

高风险，需要进行伤口处置、疫苗接种及根据既往免疫情况决定使用被动免疫制剂。犬咬伤冲洗机，用于动物咬伤后规范处理伤，该机器通过对水流、水温、水压的控制和清洗时间、清洗过程的程序设计来达到规范化的清洗，配合使用弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂，限度的减少狂犬病发病的可能性，争取防止

和减少病原微生物通过伤口而造成的感染性。犬伤专用弱碱性伤口冲洗液：

产品名称：创口清洗消毒液 产品特点：1、特点：有CMA资质的检测机构出具的狂犬病毒灭活试验报告；
2、pH值：pH值大于8的弱碱性消毒液，符合《狂犬病毒暴露预防处置工作规范》(2009版)、《狂犬病毒预防控制技术指南》的要求；3、剂量：260ml/瓶，大剂量，清洗效果更好；4、配方：复合制剂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌均有杀灭作用，可用于感染常见细菌消毒；

5、包装：瓶装、袋装，自毁瓶盖；常温避光贮存。犬伤伤口冲洗高低位冲洗池：

外形尺寸：长1300*宽800*高600（mm）材质：玻璃钢（结实、耐用）

特点：方便冲洗头部、脸部、手臂及大腿部位的伤口 便于使用后清理，废水经下水器自动排出
外观美观、占地空间小 方便患者舒适冲洗