

# 非接触红外测温额温计

产品名称	非接触红外测温额温计
公司名称	厦门特利尔电子科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区园山南路800号联发电子广场A栋
联系电话	86-05925564436 18650807548

## 产品详情

产品介绍特色1.非接触测温，安全卫生2.快速：0.5秒测温3.操作简单：一键式测量4.温度报警：可自行设定报警值5.存储功能：可存储32个测量数据6.可选模式：可选体内/体表两种模式产品属性【测温步骤】1.确认仪表已按极性正确安装电池；2.测量体温时，将模式调为“体内”模式，将仪表垂直对准额头中心，注意避免毛发、汗水、帽子等遮挡；3.确认测量距离在1-10厘米内，按下测量扳机“哔”一声，测量结束。温度值显示在lcd显示屏上。注意：用于人体温度测量时请确保拨到“body”档，用于物体如牛奶温度测量时请拨到“surface”档。【注意事项】正确的操作方法是测量准确性的关键，因红外测温对周围环境温度的要求较高，使用时，请注意以下提示：1.被测人来自环境温度差异较大的地方(如室外低温入室内高温)，应让其静待5-15分钟，等其体温与测量环境温度一致时再进行测量；2.发烧病人额头冷覆、发汗、及采取其它降温措施后，会导致测量结果偏低，应避免这种情况下测量；3.仪表从环境温度差异较大的地方取出使用时，就将其放置测量环境下稳定20—30分钟后再使用；4.不能在空调出风口或风扇下等气流较大的场所测量；5.因外在因素额头不能正确反应出人体实际体温时，可从耳垂后测量。其他说明规格参数体内量程：32.0 ~42.5 体表量程：0 ~60 基本精确度：±0.3 测量模式：额头/耳后非接触式测量距离：1~10厘米响应时间：0.5秒光谱反应：6~14um记录数据：32组自动断电：大约7秒后自动关机操作温湿度：0 ~50 /10%-90%rh电源：2节“aaa”7号电池包装尺寸：180\*130\*55mm包装重量：252g交易说明1、通过淘宝支付支付2、我公司对公账户支付