

家用血压计的功能——全自动、人性化

产品名称	家用血压计的功能——全自动、人性化
公司名称	河南传承医疗器械公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路九如路王鼎国际大厦1002室
联系电话	0371-66758993 15890085326

产品详情

一、血压计的性能 显示方式：数字式显示 测量范围：心率：40跳/分钟~199路/分钟 测量方法：示波法 存储容量：60组测量数据 电源：2节7号干电池 电池寿命：在23摄氏度的室温下使用，加压至170mmhg(22.7kpad)每天使用2次，碱性干电池约能使用300次 使用温湿度：5 ~ 40 运输和贮存温度：-20 ~ +55 运行大气压：86 ~ 106kpa 运行和贮存大气压：50 ~ 106kpa 本体重量：约132g (不包括电池)

腕带适合手腕周长：130mm~220mm 二、血压计的包装

包装盒尺寸：128(长)×92(宽)×150(高)mm

包装内附件：本体、合格证、使用说明书、收藏盒、2节7#碱性电池 三、使用方法

使用前将电池装上本体，也可使用电源适配器。 1.卸下电池盖

用拇指按下电池盖扣手位朝腕带方向拉开。 2.装入电池

将2节7号干电池装入电池盒，使正负极与标在电池盒中的正负极一致。 弹簧凸出端为负极

将电池拉带压在电池底下，以方便将电池取出。 3.盖上电池盖

按图示将电池盖对准底壳电池槽位置盖上。 四、血压计的优势：

1、使用更方便，冬天不用脱衣服，可以直接在手腕测量。

2、反应灵敏，极其细微的血压波动也能检测得到。 3、小巧方便，易于携带。 4、品质保障。

5、增加脉搏测试。 五、产品特点 具有体积小，携带轻便的特点，使用效果与汞柱血压计相同。

六、产品功能 通过aami(美国医疗器械促进协会)准确性检测标准

通过bhs(英国高血压学会)准确性检测标准 核心生物传感技术，确保精准测量 提示测量姿势错误

心率不齐，帮您实时检测心脏异常情况 可存储90次测量值 显示最近三次测量的平均值

营造安静的测量环境 时间日期显示 可接ac稳压电源