

江苏鱼跃403C压缩空气式雾化器

产品名称	江苏鱼跃403C压缩空气式雾化器
公司名称	湖北山曲通达医疗器械有限公司
价格	540.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特78号
联系电话	86-02784669787 15002720153

产品详情

产品名称：403c压缩空气式雾化器 产品类别：电子设备系列 产品编号：3.05.005 附件清单：

主机1台 喷雾器1套 过滤绵2只 熔丝管：rt1直径5×20/1.6a2只 说明书1份

合格证1份 保修卡1份 喷雾器的加药及安装方法：旋开雾化杯盖；

遵照医嘱，将适量药物倒入雾化杯内，不要超过最大刻度线；上雾化杯盖；连接t形管、波纹管、喷嘴。

操作步骤：接通主机电源；打开电源开关；

待机正常工作1-2分钟后，连接主机喷雾口与雾化杯间气导管；遵照医嘱，进行雾化治疗 使用后保养：

停机后，拔下气导管，拆下喷嘴；旋下雾化杯盖，倒空雾化杯内残余药液；将气导管、喷嘴、雾化杯盖、雾化杯、波纹管、t形管等用纯净水冲洗或浸没在温水中15分钟左右。为了清晰更加卫生，可在水中加入适量醋；注意：不可煮洗或沸水清洗以上附件，以防受热变形。

清洗完毕后，须待所有附件晾干后再存放。过滤棉的更换：

一般来说，过滤棉每使用三个月更换一次。如果发现过滤棉潮湿，需完全晾干后再使用。

更换时，拉出主机上过滤器盖，然后更换。熔丝管的更换：403c：打开机箱，取熔断丝座旋开即可更换。

熔丝管规格：rt 15*20/1.6a 注：打开机箱前请拔下电源插头，切断网电源。维护与保养及注意事项：

存放时不要折瘪气导管；长期不使用时，请拔下电源插头；存放时，须远离儿童。

压缩空气雾化器，雾化颗粒更细，更易吸收，效果更佳。

需要的药量小更适合儿童治疗，因雾化出来的颗粒极小更容易被呼吸，治疗效果更好 使用压缩空气雾化器，进行哮喘，支气管炎，鼻炎，咽炎，感冒，祛痰，咳嗽，肺气肿等呼吸道疾病的治疗，是目前国际上公认的，最有效，最无副作用的治疗方法。[雾化治疗] 雾化吸入疗法主要指气溶胶吸入疗法。所谓气溶胶是指悬浮于空气中微小的固体或液体微粒。因此雾化吸入疗法是用雾化的装置将药物（溶液或粉末）分散成微小的雾滴或微粒，使其悬浮于气体中，并进入呼吸道及肺内，达到治疗哮喘，支气管炎，鼻炎，咽炎，祛痰，感冒，咳嗽，肺气肿等呼吸道疾病。一些买家会询问用药问题，我们是专业的医疗器械的卖家，病有轻重缓和，对着电脑，即使我是医生，也没办法告诉你，有责任的感的医生也不会告诉你，即使大多数情况下都不会有问题。但是就拍万一。毕竟是治病，而且多数买家是给小孩用的，所以，我建议大家一定要去医院或者大药房（有医生坐堂），对症下药，用药量请按医生的建议用量，雾化时间最好不要超过30分钟，超过30分钟，请先将机器关闭一段时间。机器使用请按厂家说明书！

幼儿哮喘首选雾化治疗 雾化吸入疗法是指药物通过喷雾器变成细微的雾状微粒，随着患儿自然呼吸直接进入呼吸道，达到治疗气道疾病的目的。针对哮喘婴幼儿的雾化治疗有三大优势。一是使用方便，不需要宝宝的主动配合，宝宝可以通过面罩或口器轻松自然地吸入药物，避免加重因疾病不适造成的紧张情绪；二是安全性好。装置可以将药物直接送入气道，提高局部抗炎疗效的同时又可以减少全身激素对宝

宝产生的副作用男；三是适用面广。雾化吸入不仅能用于急性发作的宝宝，对于反复喘息的宝宝还能在家中用于长期预防治疗。 幼儿哮喘传统治疗方式均为全身给药，长期治疗可导致骨质疏松、高血糖等损害，并且抑制儿童的生长发育。而雾化吸入却可以避免这些问题。在欧美国家，雾化治疗的应用非常普遍，经长期临床应用和研究，未见明显不良反应。 403系列a,b,c三款区别：三款的性能参数完全一样，也就是说疗效一样，区别在于外形，403a有配件储存盒，所有配件如雾化杯等都可以收藏在配件盒里,403b尾部有藏线槽，可以把插头线隐藏进去，另外403b,403c都有雾化杯卡槽，需要暂停雾化时可以把雾化杯固定在机器上，方便使用。 403系列作为国产质量和销量最好的雾化器，电机采用高效无油活塞，无需日常保养，确保产生的气压符合医用标准，对人体无害。普通低价电机采用润滑油，电机发热后润滑油挥发产生有害气体，达不到医用标准。并且电机具有热保护功能，采用符合德国标准ul547 class b的发热保护装置。并有熔丝管（相当于保险丝）作为二重保护，确保安全。使用压缩空气雾化器，进行哮喘，支气管炎，鼻炎，咽炎，感冒，祛痰，咳嗽，肺气肿等呼吸道疾病的治疗，是目前国际上公认的，最有效，最无副作用的治疗方法。特别幼儿哮喘首选雾化治疗，幼儿哮喘传统治疗方式均为全身给药，长期治疗可导致骨质疏松、高血糖等损害，并且抑制儿童的生长发育。而雾化吸入却可以避免这些问题。用药量是吃药打针的1/10,在欧美国家，雾化治疗的应用非常普遍.关于质量：该款机器通过欧洲ce认证。什么样的产品才能通过ce认证？就是质量可靠，使用的材料对人体无害，外形可以模仿，但材料不能，小工厂一般采用普通塑料，甚至是回料，有时，从图片就能看出材料的好坏。机芯采用无油活塞，确保产生的气流符合医用标准。该产品不同于一般小工厂的所谓外贸尾单，仅仅做个模具，组装一下，所用的材料根本达不到ce标准，也没有完整的检测设备，这样的机器敢用吗？关于出雾量：一些买家买回去后会认为出雾量太小，压缩式雾化器出雾量是没法和超声波雾化器相比的，机器标配的雾化杯容量只有6ml，如果按超声波雾化量，两分钟就做完了。因为压缩雾化器雾化颗粒细，吸收好，6ml可以做20多分钟，雾化量是更加人体需要设计的，气流太大，人体会感觉不舒服，并不是越大越好，否则，厂家只要加大电机功率就可以了。关于噪音：很多人会询问噪音问题，很多人在医院做雾化时，感觉声音不大，一买回家就觉得声音特别大，其实这里有个误区，因为医院里人多嘈杂，掩盖了机器发出的声音，所以你觉的没什么声音，而我们机器买回家后，只在家做，更多的时候是晚上，因为环境很安静，所以就会觉得声音比较大。 403系列压缩式空气雾化器与超声波雾化器区别：压缩式雾化器雾化颗粒更细，可以达到0.5微米-5微米，非常容易吸收，可以治疗哮喘，支气管炎，咽炎，肺炎，鼻炎等呼吸道疾病，出雾量适合成人和小孩，因为雾气非常柔和。该类雾化器，目前已经开始普及。 超声波雾化器，雾颗粒大一些，出雾量也非常大，可以达到3ml每分钟，药物需要加大量生理盐水才行，吸收没有压缩式的好，前几年应用非常多，现在临床上应用已经非常少，家庭用保养和使用比较麻烦。优势是价格较便宜。湖北山曲通达医疗器械有限公司供应大量医疗器械产品批发，欢迎前来洽谈采购。

联系电话：027-84669787 传真：027-84624428 官网：<http://www.ylqx999.com/>