

# 甘露醇注射液恒温仪器 医疗用的甘露醇加温柜

产品名称	甘露醇注射液恒温仪器 医疗用的甘露醇加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67000.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

## 产品详情

广泛应用于临床，其在低温环境下容易结晶，如不完全溶解使用会对患者的身体特别是肾功能造成伤害，即使完全溶解后因保存不当也易再次结晶，乃引起医患纠纷，同时给临床护理工作带来不便。福意联甘露醇注射液恒温保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生

+++++

+++++甘露醇恒温保存箱使用说明

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。

2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。

3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。

4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

+++++

+++++甘露醇恒温保存箱产品参数:

【产品型号】 FYL-YS-281L 【产品种类】 恒温箱 【产品形式】 立式 【冷却/加热方式】：风冷+发热丝 【制冷剂】 无氟制冷剂 【噪 音】 46dB(a) 【功 率】 160W 【电 源】 AC220V , 50Hz 【温度范围】 0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm 【有效容积】 280L 【重量】 99kg 【温度显示】 LCD数字式 【外门锁扣】 有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。