

高负压引流器

产品名称	高负压引流器
公司名称	广州凯鸿医疗科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区西槎路827号聚龙工业区13栋5层
联系电话	020-62154088

产品详情

“创复欣”一次性使用高负压引流器

产品功效

相对于传统引流方式而言：

1、“创复欣”一次性使用高负压引流器是一种更高效的引流方式。“高负压”体现在引流的全方位性和彻底性上，被引流区内的渗液、脓液和脱落坏死组织能被更彻底、更及时地引出体外，造就一个包括引流通道的“零聚集”被引流区；

2、能够显著加快感染腔隙的闭合和感染创面的愈合，有效地预防手术野积血、积液；

3、能大幅度地减少患者抗生素的使用，有效防止交叉感染的几率，缩短住院时间；

4、“创复欣”一次性使用高负压引流器采用纯物理引流方法，完全避免了各种化学治疗（例如抗生素治疗）可能引致的副作用，总体也降低了医疗费用；

5、可以避免频繁换瓶，减少护理人员工作量；

6、“创复欣”一次性使用高负压引流器对放置的位置无特殊要求，“创复欣”一次性使用高负压引流器

无论处于何种水平位置，都能顺利引流，能有效避免逆行感染。

产品说明

“创复欣”一次性使用高负压引流器，可用于引流去除各类手术后创口血液、分泌物、组织碎片、细菌、毒素及伤口反应物质等不利于创口愈合的物质，其目的是为了减少术后残留坏死组织，避免潜在的并发症，确保伤口尽早愈合。

临床适用范围：各种手术后创口渗液引流适用

- 1.乳房肿瘤切除术（如：乳腺癌改良根治术）
- 2.腹壁手术 尤其是肥胖的患者
- 3.腹膜后手术
- 4.甲状腺手术
- 5.前列腺和结直肠手术
- 6.下肢截骨手术
- 7.骨盆骨折
- 8.上、下肢骨折
- 9.膝关节成形术（全膝关节成形术）
- 10.髋关节置换术
- 11.半髋关节成形术
- 12.全膝关节置换术
- 13.脊柱，腰椎手术等等

产品特点

- 1.采用创新专利的负压调节阀，精确调整负压值
- 2.采用塔形结构真空指示器
- 3.有效彻底地引流腔内血液和分泌物
- 4.预防局部水肿形成
- 5.降低伤口感染率，促使创面愈合

- 6.有利于术后伤口诊断
- 7.减轻医护人员工作量
- 8.减少抗生素的使用
- 9.减少敷料更换次数
- 10.减少术后住院日，节省住院费用

禁忌症：

- 1.禁止一次性使用高负压引流器放置在会对脉管系统，神经，器官带来伤害的位置
- 2.禁止将装置与肠道直接接触
- 3.禁止使用于浆膜腔内

护理注意事项：

- 1.不需要每天清倒引流液
- 2.嘱咐病人及陪护随身携带引流器，切忌固定在病床上
- 3.手术室打开包装前，请先核对产品型号并按说明书正确使用

“创复欣”一次性使用高负压引流器使用指导

1. 将引流管从伤口内穿出，最合适的位置为距伤口三厘米处。
2. 将引流管末端修剪至合适长度埋在伤口内。
3. 将伤口缝合，对引流管进行固定。
4. 剪掉穿刺针，根据引流管的粗细程度选择合适的引流瓶连接管的接头，剪掉接头前面不能用的部分。
5. 接好引流管和引流器的连接管接头。
6. 将引流器连接管上的夹板打开建立真空引力。

7. 检查引流器真空指示器状态，压缩状态方可使用。开启气体控制阀，可精确控制瓶内气压。

8. 引流器上的真空指示器升高，高负压引流系统将自动运作。