

洁露一次性产妇垫巾

产品名称	洁露一次性产妇垫巾
公司名称	广州凯鸿医疗科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区西槎路827号聚龙工业区13栋5层
联系电话	020-62154088

产品详情

“洁露”一次性产妇垫巾

洁露

医用级产品

产妇分娩前、后

产品组成

- 1、表层：采用柔软、舒适、亲肤无纺布
- 2、吸收层：卫生纸、进口木浆、高分子吸水树脂
- 3、底层：使用优质流延防水膜

产品特点

- 1、本产品为医用级产品消毒灭菌产品；
- 2、计量型产妇垫：能科学准确的计算产妇产后24小时内失血量；
- 3、柔软舒适的亲肤无纺布对产妇敏感的伤口无刺激；

- 4、超长超宽曲线设计，自然舒适，超强吸收、保持肌肤干爽；
- 5、柔软透气，特别有利于产妇会阴部位的伤口愈合与产后恢复；
- 6、专为产后皮肤敏感时期设计而开发，无刺激，柔软舒适，最大限度的减轻产妇的疼痛；
- 7、内含高分子吸收体，可快速吸收并锁水，不测漏，不回流，不会有潮湿和闷捂的感觉。

适用对象

- 1、产妇分娩前/后使用，产后24小时内计算失血量需用4片左右；
- 2、失禁及行动不便人群护理；
- 3、医护检查、护理。

使用说明

一次性使用，不可水洗，可直接铺于床上，防止床单及棉被污染

注意事项

- 1、本品经环氧乙烷灭菌消毒，一次性使用，包装破损禁用。
- 2、对无纺布过敏者禁用

产品性能结构及组成：

一次性产妇垫巾按配置不同分为检查垫、术后护理垫和保护套三种，术后护理垫由医用非织造敷布和吸液层组成，检查垫采用符合gb11115规定的高密度聚乙烯膜。

产品应无菌，环氧乙烷残留量不大于 $10\mu\text{g/g}$ 。

产妇垫巾计量型：《产程用》

顺产时垫于产妇臀部，带胎儿娩出后揭除第一层垫巾《吸附羊水》：部宫产时先揭除第一层垫巾，将第二层垫巾垫于产妇臀部。胎盘剥离后，用弹簧秤提起第二层垫巾，直接读取的数据即为产程出血量。

产妇垫巾计量型：《产后用》

防漏包裹设计，完全收集胎盘娩出后血液：底膜液显的变色，方便医护人员无需掀开垫巾便可观测出血量，根据近需要提起垫巾上的弹簧平，直接读取数据即可得出相应的出血量，可调腰带适合不同体型产妇，透气舒适。