洁露一次性产妇垫巾

产品名称	洁露一次性产妇垫巾
公司名称	广州凯鸿医疗科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区西槎路827号聚龙工业区13栋5层
联系电话	020-62154088

产品详情

"洁露"一次性产妇垫巾

洁露

医用级产品

产妇分娩前、后

产品组成

1、表层:采用柔软、舒适、亲肤无纺布

2、吸收层:卫生纸、进口木浆、高分子吸水树脂

3、底层:使用优质流延防水膜

产品特点

- 1、本产品为医用级产品消毒灭菌产品;
- 2、计量型产妇垫:能科学准确的计算产妇产后24小时内失血量;
- 3、柔软舒适的亲肤无纺布对产妇敏感的伤口无刺激;

- 4、超长超宽曲线设计,自然舒适,超强吸收、保持肌肤干爽;
- 5、柔软透气,特别有利于产妇会阴部位的伤口愈合与产后恢复;
- 6、专为产后皮肤敏感时期设计而开发,无刺激,柔软舒适,最大限度的减轻产妇的疼痛;
- 7、内含高分子吸收体,可快速吸收并锁水,不测漏,不回流,不会有潮湿和闷捂的感觉。

适用对象

- 1、产妇分娩前/后使用,产后24小时内计算失血量需用4片左右;
- 2、失禁及行动不便人群护理;
- 3、医护检查、护理。

使用说明

一次性使用,不可水洗,可直接铺于床上,防止床单及棉被污染

注意事项

- 1、本品经环氧乙烷灭菌消毒,一次性使用,包装破损禁用。
- 2、对无纺布过敏者禁用

产品性能结构及组成:

一次性产妇垫巾按配置不同分为检查垫、术后护理垫和保护套三种,术后护理垫由医用非织造敷布和吸液层组成,检查垫采用符合gb11115规定的高密度聚乙烯膜。

产品应无菌,环氧乙烷残留量不大于10 µ g/g。

产妇垫巾计量型:《产程用》

顺产时垫于产妇臀部,带胎儿娩出后揭除第一层垫巾《吸附羊水》:部宫产时先揭除第一层垫巾,将第二层垫巾垫于产妇臀部。胎盘剥离后,用弹簧胓提起第二层垫巾,直接读取的数据即为产程出血量。

产妇垫巾计量型:《产后用》

防漏包裹设计,完全收集胎盘娩出后血液:底膜液显的变色,方便医护人员无需掀开垫巾便可观测出血量,根据近需要提起垫巾上的弹簧平,直接读取数据即可得出相应的出血量,可调腰带适合不同体型产妇,透气舒适。