

魔镜仪

产品名称	魔镜仪
公司名称	东莞市麦得贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	020-28938883 18026281969

产品详情

透视皮肤 提前养护

提前三年告诉你哪个地方会长斑

提前三年告诉你哪个地方会长皱纹

提前三年告诉你哪个地方会长红血丝

透视九大皮肤问题 制定个性化护理方案

皮肤ct=皮肤弹性 角质厚簿 纤维弹性 预生斑 预生纹 抗紫外线 暗疮粉刺

爱面子，更要了解面子

提前三年了解，美丽延续一生

透视皮肤问题 制定个性化护理方案

所有的女性都爱面子，爱自己皮肤白皙，爱自己肌肤无暇.....，说起美容心得，每一个女性都滔滔不绝。但如果问她：了解自己的肌肤性质吗？她最多回答我是干性、中性或油性的皮肤。但如果再问她，了解你皮肤的性情吗，知道她什么时候会松弛吗，什么时候会失调吗，什么时候会毛孔粗大吗等等，都会哑口无言。

皮肤与我们的时间，比爱人更长久。每个人的皮肤都有自己的性情，不能用简单的干性、中性、油性来划分。爱自己，就要了解自己皮肤的个性。

提前三年了解 美丽延续一生

皮肤的性情是由：色素分布、毛孔粗细、纤维弹性、uv抗辐、暗疮粉刺、酸碱平衡、角质厚薄、真假皱

纹、水分含量九大部分组合而成。其中色素、酸碱、水份、uv是内因，毛孔、纤维、暗疮、角质、皱纹是外因。不同人的内因不同，甚至同一个人的不同时期内因不同，外因出现千变万化。

因此，女性在不同时期的保养要有针对性。传统上，我们把保养美容项目理解为普通美容护理，同一家美容院不同的顾客用一样的产品，一样的流程，一样的设备。有一个有趣的事实是，保养着保养着斑出来了、皱纹出来了、皮肤松弛了。可见没有针对性的保养等于没养，不针对皮肤性情的保养等于白养。

皮肤透视ct，特殊的美国军用的uv偏光相机，可直接观测到真皮层潜在的三年内逐步推移的色斑、红血丝；1800万像素精确彩显，200倍显微成像，可直接观测到肌肤纤维构成及毛孔生存分布状况。在强大的计算机软件数据集成处理下，可形成顾客当前当时最具说服力的个性化护理方案。

想一想，提前三年进行色斑的预防护理，三年后还有斑吗？

提前三年进行皱纹的预防护理，三年后还有皱纹吗？

皮肤ct，提前三年做护理；皮肤ct，提前三年了解 美丽延续一生。

安装说明

- 1.关闭其他应用程序,将软件狗和设备的usb线插入电脑。
- 2.将本文件夹下所有程序复制到d盘,双击运行（安装.bat）进行全自动安装。
- 3.为方便使用，可在桌面创建一个本软件的快捷方式：在（面部ct皮肤分析系统.exe）上点右键，点发送到，点桌面快捷方式，创建完毕。
- 4.再双击运行（面部ct皮肤分析系统.exe）主程序即可，默认登陆密码是：123456

如果出现自动安装失败，请照下面方法进行手动安装！

- 1.拷贝setup\cam\下所有文件到 c:\windows\system32\里边
- 2.拷贝setup\pro\下所有文件到 c:\windows\system32\里边
- 3.拷贝setup\dll\下所有文件到 c:\windows\system32\里边
- 4.然后双击运行“失败后安装.bat”文件

软件说明

1.本系统的主要功能是：利用尖端电脑信息科学技术，对获取的图像进行多项目精确的深入的分析，以超

越人眼的观察能力，为美容或医疗行业提供相关技术参考。目前分析的项目为色斑、毛孔、粉刺、粗糙度

、暗斑、纤维断裂。

2.核心部分采用向导式循环流程：（会员 => 扫描 => 分析 => 报告）。

3.报告完成之后，将会返回会员模块，开始下一个会员的检测流程。

4.图形分析技术是世界高精尖项目，程序可能存在不足之处，敬请包涵！

5.本公司保留继续调整程序的权利，将对本系列产品提供持续升级开发，欢迎提供宝贵意见

使用说明

1.软件主要功能模块

会员功能:

1.具有增加、修改、删除、搜索会员功能，并可选择配备会员卡及读卡器。

2.点击【显示所有会员】以便显示会员。

3.在左边列表点选相应会员后，可以点【下一步】进行图像扫描了

备注：如果您新加了会员，需要点一下【显示所有会员】刷新，在左边列表的最后可以看到新加的会员

扫描功能

1.检查设备与主机连接是否正常，若出现找不到“ canonocx.ocx ”错误提示，则表示程序没有成功安装。

2.按下【连接仪器】按钮，视频监视区应该显示即时视频图像。

3.调节焦距,调节到自我感觉最清晰为准。调节光源为白光。

4.按下软件界面右上【图像扫描】按钮，拍摄数张白色图象。

5.软件将每隔3秒拍摄一张图像，请在3秒内及时更换位置和调节焦距。

6.按下透视探头尾部银色按钮，切换光源到紫光，按下软件界面右上【图像扫描】按钮，拍摄数张紫色图象。

7.拍摄完毕后，按下【关闭仪器】按钮。

备注：【设置】中各项一般无需改动，使用“默认值”即可。

分析功能

1.名词解释：rgb：白光。uv，紫光。

2.本系统能分析白光图的（rgb色斑、rgb毛孔、rgb粉刺、rgb粗糙）四个指标、能分析紫光图的（uv暗斑、uv纤维）两个指标。特别注意的是：rgb色斑、rgb毛孔、rgb粉刺是单张手动精确分析（定量分析），rgb粗糙、uv暗斑、uv纤维是电脑批量自动分析（定性分析）。

系统能自动判断你选的图象是白光或者紫光，并显示能分析的相应按钮。

3.电脑批量自动分析：

a.在（图像列表）中点图片，将会在左边显示大图，检查图象是否清晰，请勾选清晰的图片，去掉模糊图片下面的勾，再按下【批量定性】按钮，程序将会对所有勾选的图象进行定性分析（rgb粗糙、uv色斑

、uv纤维)，并将分析数据存入后台。

4.单张定性指标的查看：

先在（图像列表）中选择需要单独分析的图片

点击定性的按钮，在左边大窗口即时查看对应的分析的结果，窗口顶部有分时（目前、3年后、5年后）按钮，可以查看预测结果。

5.单张手动精确分析：

先在（图像列表）中选择需要单独分析的图片

a.按下【定量色斑】或【定量毛孔】或【定量粉刺】按钮，底下将弹出xx数量或半径测定

b.按下【xx数量测定】，在xx目标上单击鼠标，直到全部标完。

c.按下【xx半径测定】，在xx目标中心按下鼠标，拖动，直到刚好框住目标。

d.测定完毕，按【保存】按钮

e.定量色斑、毛孔、粉刺的操作原则是：见到就执行定量测量。

重要：全部分析完毕，必须按【下一步】生成分析数据，并进入报告模块

报告功能

1.按下【生成报告】

2.查看各项目分析结果。

3.按下【打印报告】弹出对话框，选择要打印的页，再点【打印】。

4.按下【下一步】将回到（会员）模块，重新选择会员，开始新任务。

查询功能

1.要查询会员检测记录，请在输入口刷卡或者输入卡号，然后按【确定】，左边即显示全部记录。

2.或者先在会员模块选择好会员，再回到查询模块，点【查看（当前活动会员）检测档案】，左边即显示全部记录。

3.列表中的对应记录，有一个状态栏，此栏显示会员该次是否接受了治疗或者处理（1），存档时默认是没有接受治疗或者处理的（0）。如果接受了治疗或处理，请务必点一下对应行的记录，再在右边选择yes，然后按【修改】按钮。

设置功能

1.公司信息、密码、注册设置

2.分析结果表与对应治疗建议的设置。