

# 全自动生化分析仪DP8088

产品名称	全自动生化分析仪DP8088
公司名称	长春市博特生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吉林省长春市高新开发区光谷大街2388号B栋1区
联系电话	18910237996

## 产品详情

### 性能特点

工作方式：分立/任选式

测试速度：最大测试速度为450test/h（不含ise的速度）

工作原理：吸收光谱法、透射比浊法

测试方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）单/双波长法

测试顺序：严格按样本顺序测定、急诊随时插入

在线项目：76个

在线样本：每批80个，可以无限量输入多批

比色杯：比色杯材料为石英玻璃或透紫外塑料，最小反应体积为150ul

比色杯数：81个

比色杯利用方式：6组清洗针,12步清洗,循环使用,可选用酸碱清洗液

光学系统：光栅式后分光式

波长范围：340 ~ 800nm波长任选

吸光度范围：0 ~ 4abs

样本量：2 ~ 30  $\mu$ l 0.1  $\mu$ l 递增

样本盘：圆盘式，独立的样本仓，最大80个，自动识别原样管和样品杯

样本

针：单独一根,内外壁高度抛光，具备液面检测及任意方向防撞功能,加样后自动清洗,携带污染率<0.1%

样本管：兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等

试剂量：20 ~ 300  $\mu$ l，1  $\mu$ l 递增

试剂盘：圆盘式，独立的试剂仓，最大76个

试剂针：单独一根,内外壁高度抛光，具备液面检测及任意方向防撞功能

试剂瓶：可使用容积为15ml、20ml、30ml、50ml、70ml的试剂瓶,死体积小于1ml

搅拌

杆：独立搅拌杆、特殊材料制成，表面采用特富龙处理，不挂液,完成样本和试剂加样后立即搅拌

加热方式: 固体恒温全封闭直热，温度平衡时间:小于3分钟

试剂仓温度: 4 ~ 12℃，反应温度：37  $\pm$  0.1℃

软件操作系统: windows2000、xp，数据存储：自动存储、自动备份,永久保存各类数据。

打印格式：可以任意定制打印格式，提供几种常见格式

定标类型：线性、logit-4p、logit-5p、spline、指数、多项式：自动核查定标曲线，自动选用拟和度最好的定标类型

质控类型:实时质控、天内质控、天间质控，质控图：I-j、cumulative、twin plot

质控规则：任意定制，默认为westguard多规则，状态监测显示：样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测；反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测；实时显示反应盘湿度、试剂余量显示；实时反应曲线、定标曲线及质控图显示

耗水量：不超过6升/小时