

蓝牙手指式脉搏血氧仪

产品名称	蓝牙手指式脉搏血氧仪
公司名称	武汉思创电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市光谷大道福星医药园6幢2层
联系电话	86-02787810615 13476016682

产品详情

产品免费咨询热线：400-027-0086

产品描述：

基于数字血氧技术，采用先进的dsp算法可以减少运动伪迹的影响和提高弱灌注情况下的测量精度。
主要特性：

采用最新研究成果采用精模生产的一款指式血氧仪 有声音，可自由设置报警上下限；
彩色点阵式oled显示屏； 波形、数据、脉搏强度同屏显示； 低功耗设计，超常工作时间；
运动及抗干扰模式； 独特的弱信号处理，弱灌注强度： 0.3%； 节电模式，8秒无信号自动关机；
人性化设计，轻便舒适； 屏幕方向自由切换功能，方便使用和观察； 一键式操作，简单灵活；
体积小、重量轻； 适用人群：成人、儿童、小儿；
使用范围：病房监测、患者转运过程监测、康复保健、社区门诊、家庭保健护理。技术指标：

spo2	
测量范围	0-100%
分辨率	1%
精度	70% ~ 100% , ± 2%; 0% ~ 69% , 未定义
脉率	
测量范围	25-250bpm
分辨率	1bpm

精度	2bpm
电源要求	2枚1.5v碱性aaa级电池
工作电流	30ma
监测参数	血氧饱和度 (spo2)、脉率 (pr)、脉搏强度

测试配件：蓝牙适配器（附件有光盘）、bluetoothcom软件。

操作步骤：

1. 先安装蓝牙适配器软件bluesoleil，插入蓝牙适配器，运行蓝牙适配器软件。
2. 再安装bluetoothcom，直接复制到桌面就可以使用。
3. 打开蓝牙脉搏血氧仪，测出数据。
4. 点击蓝牙适配器软件的搜索键（红球）或右键选择general inquiry,搜索出蓝牙脉搏血氧仪。
5. 搜索出蓝牙脉搏血氧仪地址后，右键点击“refresh services”，显示有蓝牙串行端口服务。
6. 再右键点击“pair device”，弹出对话框。输入“0000”口令。
7. 打勾表示配对成功。
8. 再右键点击“connect/bluetooth serial port service/bluetooth serial port service a”连接，弹出对话框，记住端口serial port，如“com5”等，点确定。

成功连接后显示虚线连接线。

9. 在不清楚端口状态下可点击右键“status”查看远程设备状态的端口。

10. 在bluetoothcom软件上选择对应的端口，如“com5”等，即可显示数据。

9. 在蓝牙适配器软件bluesoleil没有退出下，蓝牙脉搏血氧仪自动关闭后再次开机可自动连接。