

液体（盐水）加热器干热型 生理盐水冲洗液加温箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 液体（盐水）加热器干热型 生理盐水冲洗液加温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 76939.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

液体（盐水）加热器干热型 生理盐水冲洗液加温箱产品用途-

微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度，并具有温报警功能，更安全，更放心。本产品可加温瓶装或袋装液体，加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等相关液体，深化手术室护理质量。

液体（盐水）加热器干热型 生理盐水冲洗液加温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

液体（盐水）加热器干热型 生理盐水冲洗液加温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

液体（盐水）加热器干热型 生理盐水冲洗液加温箱相关-

术中输注液体与冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用效果。方法：选择我院接收的手术患者 100例，根据入院治疗顺序随机分成对照组与观察组各50例，对照组采取液体不加温措施，观察组则在手术过程中将冲洗液体和输注液体加温为37℃，统计两组患者术中的体温变化情况及术中不良反应，并将结果进行对比。结果：经治疗后，观察组患者术中的体温变化幅度显著小于对照组，比较差异显著（ $P < 0.05$ ）；两组患者在术中没有出现明显的不良反应情况，比较差异不显著（ $P > 0.05$ ）。结论：对患者应用加温术中液体的方法安全，可以保证

患者在手术过程中体温的稳定，为手术的成功完成提供了强有力的保证。液体（盐水）加热器干热型生理盐水冲洗液加温箱