

## 红侠早早孕检测试纸（精条）

产品名称	红侠早早孕检测试纸（精条）
公司名称	北京库尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区窦大路九区30号
联系电话	86-01069391166/400-606-1166

## 产品详情

产品名称：红侠早早孕检测试纸（精条） 适用范围：对妇女早期妊娠的体外检测及辅助诊断。

生产许可证号：京药监械生产许 20060061号 产品注册证号：京药监械（准）字2009第2400264号  
产品标准编号：yzb/京 0089-2009

**【检验方法】** 1.撕开铝塑袋，取出试纸。 2.依据型号进行操作（尿液不得直接浸湿观察区）。  
2.1条型:将试纸白色一端浸入尿液中(液面不得超过横线)保持10秒钟;  
2.2卡型:直接将尿液滴至加样孔，约2-3滴; 2.3笔型:直接将尿液淋至加样区，保持5-10秒钟。  
3.将试纸平放1分钟，等待红色条带出现。 4.5分钟内观察结果，5分钟后判读无效。

**【结果判读】**  
阳性：出现两条红色条带。一条位于对照区（c），另一条位于检测区（t），表明已怀孕。  
阴性：仅在对照区（c）出现一条红色条带。在检测区（t）无红色条带出现，表明未怀孕。  
无效：5分钟在对照区（c）无红色条带出现,提示测试失败或试纸已失效。