

电子血压计天翔血压计招商批发电子血压计品牌

产品名称	电子血压计天翔血压计招商批发电子血压计品牌
公司名称	北京锦程天翔科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市顺义区天竺空港经济开发区A区天柱西路53号
联系电话	037186547923 13552722272

产品详情

产品介绍：本产品用于测量血压高低及脉搏数，血压随时都在变化，所以请在每天固定时间测量，测量时应该保持情绪稳定，并在医生的指导下判断测量结果，以便帮助您进行将抗管理。安全注意事项：

- 1.自己判断测量结果而进行治疗十分危险。
 - 2.请勿在本产品附近使用手机，以免存在电磁干扰，对本产品的准确度产生影响。
 - 3.请勿私自修理，拆卸和改造
 - 4.请勿撞击或摔落本机，避免受到碰撞或强烈冲击
 - 5.请在室温环境下使用
 - 6.袖带仅用于测量血压时卷绑手臂
 - 7.请勿沾染灰尘或腐蚀性液体
 - 8.测量时请勿触碰主机
 - 9.长时间不使用请取出电池
 - 10.请勿在袖带未缠入手臂是按开始或结束按键
 - 11.本产品不适用新生儿
- 产品规格：1.测量范围：压力（0mmhg-280mmhg);脉搏数：（40-160）次/分
2.准确度：压力：（+-3mmhg);脉搏数：5% 3.电源：dc6v（aa）4节 4.低电侦测：《4.4v
5.工作环境:温度：10度-40度 湿度：15%-90% rhmax
6.可测手臂周长：22cm-32cm 7.自动存储记录容量：99组 8.尺寸：150mm*108mm*60mm(l*w*h)
9.全自动加压和减压 10.语音播报功能 按键功能：1.记忆键：当开机后，按下此键可跳出测量值，并显示最近一次测量值，可用此记忆键逐个查看数据。并显示出当时所测试的时间，血压值和脉搏数及所存的位置，并依序播报高压与低压心跳数量测量值。 2.模式键为调整时间的确认键，首先按一下模式键，lcd上会出现时间在闪烁，此时在设置键可以向上调整，如不按任何键，则会山东大约20秒后回到初始状态。如果按模式键，则需要调整额分钟点在闪烁，即可按设置键调整，依次用模式键和设置键来调整所需的时间。 3.加压/停止键为开始/停止测试血压和脉搏键 操作说明：1、本产品只用毫米汞柱（mmhg）2.按下开始/结束键，全显大约3秒后，lcd只显示时间。在按下开始/结束键，开始测量自动从00mmhg加压并出现加压符号，打气只设定压力点自动停止加压。 3.压力逐渐下降进行测量，当检测到脉搏后，心型符号闪烁并伴有b1---b1的声音，直到显示血压的最高值和最低值及脉搏数，此时依序播报高压与低压心跳数量测试值袖带内的空气自动排出，血压的数值在mmhg,此时可读出数值，并依据“世界卫生组织”所定义的血压范围指示 正确的测试姿势：正确的测量姿势对测量也是非常重要1.挺直身体，保持正确坐姿，手指不要用力，自然伸展状态。*注意不要让身体前倾弯曲 2.测量时请在身体放松的状态下测量。且在测量前必须保持4-5分钟的安静，否则将影响测量结果。其次，每天在同一时间，用同一只手臂及相同的姿势进行血压测量。 3.测试时，将臂带的中心与心脏高度（乳头位置）保持一致