

## 厂家直销臣平防疫箱CP030防疫冷藏箱保温范围2-8

产品名称	厂家直销臣平防疫箱CP030防疫冷藏箱保温范围2-8
公司名称	杭州臣平机械设备有限公司
价格	405.00/台
规格参数	外:525*315*360 内:443*230*283
公司地址	杭州西湖区龙申综合发展中心
联系电话	86-0571-88682920 057188687920 18005814577

## 产品详情

臣平血液冷藏箱（生物安全运输箱）是主要是用来冷藏血液(全血)的专业冷藏设备，也可用于冷藏药物、生物制品、试剂等。适用于医院、疾病防治控制中心及大小血站等。

型号：	冷藏箱cp030
应用领域：	人畜疫苗、生物制剂、活性细胞、动植物标本、血浆、血液制品、人体干细胞等相关冷链运输

内部容积：	30l
外部尺寸：	320*320*345 mm
内部尺寸：	240*254*285 mm
保冷时间：	保冷时间：环境温度43℃下，箱内液态温度2~8℃，冷藏时间48小时；增加冰源可使时间增加到72小时。
制作工艺：	外层均采用pp硬制塑料，内层采用的abs食用塑料注塑而成
箱体材质：	pp原米塑料
箱体自重：	5.8kg
保温层：	聚氨酯无氟发泡（pu发泡）
隔层厚度：	35mm
箱体承重：	箱体承重100公斤以上，连接件拉力60公斤以上
牢固等级：	箱体A级，连接件B级；
配件材质：	塑料，不锈钢；
水源配置：	65*95*35mm冰盒

水源材料：	材料：聚乙烯 高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性；
冷冻特点：	在冷冻成固体时，冰排最大厚度不超过未冻结时厚度的15%；
其他说明：	全拆卸盖体，备有提手，背带；

产品详细特点：
一：密封性强
密封性是考验一款冷藏箱性能的重要指标之一。本产品内外层采用高强度环保材料pp（食用）abs（食用），中间夹层采用聚氨酯材料（pu）做保温层，经过世界上最先进的-----旋转模压工艺一次成型精制而成的。让您在运输血液的时候更安全。
二：环保
无毒无味、抗紫外线、让血液更安全。不易变色，表面光滑，容易清洗。设有提手背带，可提可背方便快捷。
三：保冷性能优越保温效果好
产品配合0.4升卫生标准冰排，将冰排放入-20℃冰柜里冷冻24小时充分蓄冷，按照标准配置血液冷藏箱内温度保持在8℃以下可以达到24小时，适用于各种中远距离低温血液运输。另设开口，方便存取样品。
四：耐热耐冷
为了保持血液在运输过程中的安全，血液冷藏箱对耐热性耐冷性的要求比较高，在高温的水中不会变形，甚至可以用沸水消毒。
五：耐用
要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，正常使用可达10年之久。循环使用，安全环保。

## 适用范围

本产品适用于任何物品的长时间冷藏（2~8℃）和保鲜，适合野营、郊游、垂钓、漂流等户外休闲活动中使用；还可适用于医用采样、取样，生物制剂冷藏低温运输、血液运输等！也可用于超市购物时保存需要冷藏保鲜的物品！

## 产品使用说明

1. 使用血液冷藏箱前仔细检查包体是否有破损，破洞，扣具是否损坏，确保血液冷藏箱的密封性完好。
2. 取出血液冷藏箱箱内配置的冰盒，检查冰盒是否完好。注水至标示的注水线处。
3. 将注水好的冰盒分开，平整的放入冷库或者冷柜，适当预留空间（因冰盒冷冻后体积会略为膨胀），冷冻约6-10小时以上（该时间长短与设备冷冻能力有关）直到蓄冷剂完全结冻成固体。
4. 把冻结好的冰盒放入冷藏箱。
5. 待冷血液冷藏箱箱内温度达到要求后，放入物品。若有搭配隔板，请将物品与冰盒之间用隔板隔开。
6. 盖上盖子，检查血液冷藏箱箱盖是否密封。

## 注意事项

1. 使用一段时间后，当血液冷藏箱内的温度高于8℃时，请替换完全冰冻的冰盒。
2. 使用完血液冷藏箱后，仅需要用干布轻轻擦拭箱体即可。
3. 请妥善保管冷藏箱，以便再次使用。
4. 请轻拿轻放冰盒。如遇冰盒破裂，请更换新的冰盒。
5. 血液冷藏箱内冰盒数量可灵活调整，以满足不同客户对温度和空间的要求。
6. 冬天，即使除去内袋和冰盒，血液冷藏箱具有非常好的保温效果。