

无锡圣亿医用高分子绷带全国招代理经销商

产品名称	无锡圣亿医用高分子绷带全国招代理经销商
公司名称	无锡圣亿科工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏无锡锡山区锡北镇
联系电话	86-51066066588

产品详情

第一类医疗器械生产企业登记号：苏锡食药监械登字20110010号

医用高分子绷带注册号：苏锡食药监械（准）字2012第1640019号

注册产品标准编号：yzb/苏（锡）0018--2012 国际认证：iso13485：2003 ce

医用高分子绷带是取代石膏绷带的新型外固定材料，它采用先进独特的配方，结构匀称且坚固、强度大（强度是普通石膏的20倍）、透x射线（不拆即可拍x片且非常清晰）、轻便（是普通石膏重量的1/5，厚度的1/3）、粘性低使用方便、容易成型（弹性良好，可塑性强）、抗水性好、透气性好（石膏绷带的200倍），对患部具有服贴性，而且硬化后可受潮、浸水，强度不受影响、经济实惠、规格多样于一身的多特性产品。适用于各种部位骨折的外固定和矫形外科手术后的治疗等。

特点：1、透气性好：透气率是石膏绷带的200倍。能避免使用其他石膏玻纤绷带造成的皮肤瘙痒与皮肤刺激，而利于皮肤的呼吸、除汗、解痒、消肿、减少感染，给病人舒爽的感觉。2、坚固：固化后强度是普通石膏绷带的20倍，抗冲击强度 $12\text{kg}/\text{m}^2$ ，有很好的保护性，可以抵抗意外事故对治疗部位的伤害。3、轻便：仅是石膏重量的1/5、厚度的1/3。患者负重小有利于局部血液循环，促使愈合。美观轻便护理量少，利于康复练习。4、透x射线：不用拆除即可拍x光片且非常清晰；有利于接骨和确定受伤状态，便于观察治疗效果。5、使用方便：粘性低，绷带容易打开，不粘手套。只需自来水，不要加热设备。6、容易成型：本品具有良好的弹性，可以塑形及整合；固化时间短，10分钟后硬化，30分钟后可承重。7、抗水性好：硬化后，不怕浸水，病人可以沐浴或进行水疗。8、操作简单：操作方法与石膏绷带相似，不改变骨科大夫原有的习惯。9、环保产品：清洁卫生、无毒、无粉尘、用量少。10、适用范围广：骨科的固定，整形外科的矫形具，假肢辅助功能用具，支撑工具。烧伤科的局部防护性支架等。

注意事项：1. 要贴着患部滚动缠绕，不要抽拉而缠得太紧，以免固化后影响血液循环。2. 高分子绷带在纱布或棉套上缠绕，使用中避免与人体皮肤直接接触。3. 固化之前肢体不要移动，以免影响固定效果。4. 绷带末端不要拉伸，应让其自然粘和，用胶带粘紧。5. 全部缠完后应在表面反复捋摸塑形，使层与层之间充分粘结牢，以增加绷带的粘合性等物理特性。6. 绷带固化过程中有温热感觉属正常现象。7. 绷带包扎后若受潮，需用电吹风吹干，以免皮肤发炎。8. 拆除时，可用电锯、剪刀，切开后的绷带较锋利，当心划伤皮肤。9.

绷带可采用一般运输工具运输，在运输时应防止重压、钩刺、阳光直晒和雨水浸淋。 10. 储存的绷带不要损坏外包装，以免变硬失效，

编号	型号	规格	包装	(宽 × 长)	(袋/箱)
1	sch24	5			
		cm × 360 cm	50袋箱		
2	sch34	7.5 cm × 360 cm	50袋箱		
3	sch44	10 cm × 360 cm	50袋箱		
4	sch54	12.5 cm × 360 cm	50袋箱		
5	sch64	15 cm × 360 cm	50袋箱		