

# 江苏圣亿医用高分子夹板招区域代理商

产品名称	江苏圣亿医用高分子夹板招区域代理商
公司名称	无锡圣亿科工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏无锡锡山区锡北镇
联系电话	86-51066066588

## 产品详情

医用高分子夹板注册号：苏锡食药监械（准）字2012第1640020号

注册产品标准编号：yzb/苏（锡）0019--2012 国际认证：iso13485：2003 ce

- 1、坚固：强度是传统石膏的10倍，固化后抗冲击强度  $12\text{kg}/\text{m}^2$ ，有很好的保护性，可以抵抗意外事故对治疗部位的伤害。
- 2、轻便：仅是石膏重量的1/5、厚度的1/3。患者负重小有利于局部血液循环，促使愈合。美观轻便护理量少，利于康复练习。
- 3、透气性好：透气率是传统石膏的100倍。能避免使用其他绷带长期局部包扎造成的因透气性差所至的皮肤潮热、瘙痒和刺激,而利于皮肤的呼吸、除汗、解痒、消肿、减少感染发炎，给病人舒爽的感觉。
- 4、透x射线：不用拆除即可拍x光片且非常清晰；,有利于接骨和确定受伤状态,便于观察治疗效果。
- 5、操作简便：医生不用戴手套，操作和塑型更方便，拆除更简单。
- 6、舒适性：高分子夹板固化后收缩性小，不会产生石膏变干后使皮肤发紧、发痒、发热烧灼感的不适感觉。夹板内侧厚层无纺棉抗菌除臭，外面绑定的纱布可自行解除，洗澡冲凉擦干后再绑定夹板，便利舒适更人性化。
- 7、安全：除掉外绑定的纱布即可拿掉夹板，无须电动石膏锯切割，患者更安全。
- 8、环保产品：100%聚酯纤维，不含玻璃纤维，清洁卫生、无毒、无粉尘、皮肤不过敏无瘙痒，用量少，使用废弃后可入焚烧炉完全燃烧、符合医用环保要求。
- 9、规格多样：适用于不同部位、方便选择。常用ss312、ss420、ss630。
- 10、适用范围广：骨科的固定，整形外科的矫形具，假肢辅助功能用具，支撑工具。烧伤科的局部防护性支架等。

使用方法：1．根据需外固定的患部的长宽选择相应规格的夹板。2．操作时医生不用戴手套。3．打开一袋包装袋，把夹板外侧薄层吸水无纺布朝下放在常温（20~25℃）的水面，打开夹板一侧的口，让水灌入夹板中间层。一只手压着夹板上层面，另一只手托在夹板下侧，来回挤压，使夹板中间层均匀充分地吸满水。厚无纺棉衬垫尽量保持干燥，时间约5~10秒钟。

- 4．取出夹板，挤绞干水，然后用干毛巾卷绕夹板，吸收去掉多余水份。
- 5．将夹板的内侧厚无纺棉层紧贴皮肤托放在需固定部位，根据需要塑型，同时用纱布绷带或弹性绷带缠绕固定，松紧适中。
- 6．操作一般在3~5分钟内完成，夹板硬化前10分钟内，患部不能活动，20分钟后可承受重量。
- 7．需外固定的患部有皮外伤或需操作时间更长时，夹板可先不湿水，直接进行固定，用纱布绷带或弹性绷带缠绕固定后，可在薄外层喷洒水来加速硬化速度。
- 8．剪开纱布绷带或弹性绷带即可轻松拆除夹板。
- 9．通过调节浸水温度和环境温度，可以调节硬化时间。水温 and 室温提高，硬化时间缩短。冬天可提高浸泡水温（35~40℃）和室温，同时让夹板中间层浸泡充分吸满水，然后挤挤干。

编号	型号	规格 (宽 × 长)	包装 (袋/箱)	适用部位
1	ss312	7.5 cm × 30 cm	90袋/箱	短臂
2	ss336	7.5 cm × 90 cm	40袋/箱	长臂
3	ss416	10 cm × 40 cm	60袋/箱	短臂、短腿
4	ss420	10 cm × 50 cm	50袋/箱	长臂、短腿
5	ss430	10 cm × 75 cm	40袋/箱	长臂、长腿
6	ss530	12.5 cm × 75 cm	30袋/箱	长臂、长腿
7	ss546	12.5 cm × 115 cm	20袋/箱	长腿
8	ss630	15 cm × 75 cm	30袋/箱	长腿
9	ss646	15 cm × 115 cm	20袋/箱	长腿