

手动梅花针组合产品近视眼治疗专用

产品名称	手动梅花针组合产品近视眼治疗专用
公司名称	北京博裕堂工科贸有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	北京海淀魏公村
联系电话	010-56219857 18911378223

产品详情

梅花针、通络棉球90粒、操作流程视频光盘、药棉钳。单价：1500元；

适用范围：近视、弱视、远视、散光、干眼症等。 产品特点：此中医产品治疗近视、弱视、散光、远视、干眼症等症状，不扎针不吃药，购买产品在家自己治疗，每天几分钟，每次几元钱，无痛无创，不伤及皮肤，经临床实践证明，疗效显著不反复。 治疗部位：共有五个治疗部位，头顶部位、头枕部位、耳后部位、后颈部位、手臂部位（不在眼睛周围做文章，通过中医经络中的络脉调理内脏治疗眼睛，标本兼治）； 治疗原理：预防和治疗近弱等，首先要分析成因。中医认为：久视伤肝，肝血不能上荣于目，久之形成近觑眼，统称视物不清。治疗的根本就应从内脏调理入手，通过对心肝肾的调理，使眼球气血通畅，营养乳润充盈，增强视神经的敏感度，有效改善眼球的供血状况，从而达到有效的预防和治疗的作用。 注意事项：1、急性传染病、皮肤烫伤、孕妇和皮肤溃疡患者禁用此方法治疗。2、禁止使用劣质梅花针，针面不平、针尖太锐或太钝、针柄的柔韧度不高等现象都会影响治疗效果，或伤及皮肤。3、梅花针的操作要正确，叩刺时必须叩准、叩稳，利用手腕的冲力和弹力敲击。

4、由于近弱视疾患易反复，需持续治疗。疗程内中断治疗会影响疗效。 准备工作：

第一：梅花针使用者叩刺练习 1、基础练习：用梅花针无针的一面叩刺柔软的物体，如枕头、沙发垫等，锻炼手腕力量和频率，找手感。建议练习时间为2小时以上。 2、基本练习：用梅花针无针的一面叩刺自己的合谷、外关等部位，达到用力均匀、叩刺频率为每秒2—4下。建议练习时间为2小时以上。 3、实操练习：用梅花针有针的一面叩刺自己的合谷、外关等部位，要求每分钟叩刺100—130下，同时自己感受叩刺的力度，达到微痛、皮肤无创伤为佳。建议练习时间为3小时以上。

第二：治疗准备工作：1、治疗者应进行皮肤清洁，尤其是治疗部位，保持干净，如头发很脏，要求清洗一下，然后坐在能够伏案趴下的位置上；2、用酒精棉球对梅花针消毒。

3、用药棉钳夹住75%酒精棉球（自备）对治疗部位进行消毒。

博裕堂负责本产品的售后的治疗技术指导和个性化服务。本产品在使用过程中，有问题请随时致电4000850585或18911378223，也可通过qq1603454598进行视频指导，如需专家咨询，请提前预约。