

伽利略镜框式医用放大镜250R

产品名称	伽利略镜框式医用放大镜250R
公司名称	南昌迈柯尔医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌高新技术开发区
联系电话	86-079182036019 13879196853

产品详情

【佩带方法】：

1. 镜片的选择：

眼镜片采用的是平光光学树脂镜片，无需视力矫正者可直接使用，需使视力矫正者（近视、散光者）经验光后由专业人员换配适合的镜片后使用。

2. 内侧鼻翼垫无需调节，可适应任意使用者，方便舒服。

3. 镜架的松紧度可以让使用者弯曲调节。

4. 适当收紧辅助带，让放大镜安全舒适的处于合适的固定位置上。

5. 调节瞳距旋钮，首先使瞳距最宽，再向内调节，使双侧目镜视野重叠，继续向内调节直至两个区的视野成为一个椭圆形。

6. 在不使用目镜时，可以将目镜上翻至不妨碍视线位置。

【适用范围】：

1. 适用范围：

眼镜式放大镜广泛应用于各行各业如医疗行业（眼科、心脏外科、神经外科、美容科、牙科医生、兽医）、宝石加工、缝纫、刺绣、邮票收集、阅读、绘画、精密加工及检查、模具制作、模具装配、雕塑、拍照、微型电子元件的装配及精密制图等。

2. 使用特点：

具有重量轻，使用方便的特点。选用伽利略眼镜式手术放大镜可让您腾出双手做更精细的工作。无论采用何种姿势都不会感觉疲劳，长时间工作也会感觉轻

松。专业放大镜为眼镜式低倍率的显微放大装置。它可将眼睛所观察到的细微结构放大从而获得更清晰的图像。五官科医生可以使用它做显微手术。眼科医生可以运用伽利略眼镜式放大镜使眼科手术实施的更加顺利和得心应手，牙科医生可将他运用于观察牙齿的细微结构，从而放大获得更加清晰的图像。尤其是烤瓷修复基牙预备，牙医可以使用伽利略医用放大镜使牙体预备更光滑细腻，为牙科医生提供高质量的视野帮助。为做好临床修复提供了方便。

【注意事项】：

1. 目镜的光轴方向已经过仪器测量固定，使用者无需调节
2. 消毒清洗本品不得使用高温高压及腐蚀性消毒液消毒，建议使用表面消毒液消毒（如酒精擦拭），清水冲洗（清水冲洗不要长时间的操作，灰尘特别多的情况下采取此方法），最后擦干晾干。